

# デジタルワイヤレス補聴援助システム Roger ロジャー クリップオンマイク Roger Clip-On Mic 取扱説明書（操作編）



## はじめに

このたびはフォナックスのデジタルワイヤレス補聴援助システム Roger（ロジャー）をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご利用の前に本取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとは大切に保管し、必要なときにお読みください。

**別紙「安全上のご注意」も必ずお読みください**

## 1. 本体付属品



## 2. 各部の名称



## 3. ロジャー クリップオンマイクの準備

- ロジャー クリップオンマイクを充電する  
ロジャー クリップオンマイクには繰り返し充電が可能なり  
チウムポリマー充電池が使用されています。
- 充電方法  
充電スタンドに AC アダプターを接続し、ロジャー クリップ  
オンマイクを差し込みます。
  - ACアダプターにつないだままにいても、ロジャー クリップオ  
ンマイクのバッテリーは過充電されません。
  - 充電中もロジャー クリップオンマイクを使用できます。

## 5. ボタンの扱い方



本書でのボタン操作は以下のとおりです。

- ボタンを押す ボタンを短く一回押す
- ボタンを○回押す ボタンを指定された回数繰り返し押す
- ボタンを長押しする 特定の動作を始めるまで（2～3秒ま  
たは指定の長さ）押し続ける

## 6. ロジャー クリップオンマイクの使用方法

### 基本的な使い方


あらかじめ、補聴器・人工内耳およびロジャー受信機を使用可能に  
しておきます。補聴器・人工内耳およびロジャー受信機の取扱説明  
書もあわせてご参照ください。

- 電源を入れる  
電源ボタン  を長押しして、電源をオンに  
します。インジケータが白く一回点灯 (○)  
します。
- ロジャー受信機をネットワークに追加する  
受信機から 10 cm以内の距離で、ロジャー ク  
リップオンマイクの追加ボタン  を押  
すと受信機がネットワークに追加されます。  
結果はインジケータに表示されます。







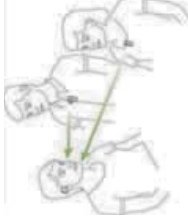



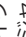

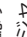










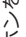


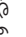

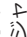

### 複数のマイクロホンを使用する

ロジャーでは複数のマイクロホンを同  
じネットワークに追加することが出来  
ます。これを MTN（マルチ・トーカー・  
ネットワーク）と呼び、最大 10 台のマ  
イクロホンを使用できます。



### (インジケータ表示)

- ....................................................................................

まずミニピンプラグ、マイクロ USB ケーブと音響機器を接続し、次にロジャー クリップオンマイクのマイクロ USB 端子にケーブルを接続します。  
いずれの方法でも、外部入力の音声が入っている間は、ロジャー クリップオンマイクのマイクロホンは無効になります。

## 8. ロジャー クリップオンマイクの使用スタイル

ロジャー クリップオンマイクは胸元に取り付け、口元から 15cm 以内の場所で使用します。  
衣服のデザインに合わせて様々な留め方が可能です。




襟に留める (クリップは下向き)




ボタンとボタンの間に留める (クリップは横向き)

誤った留め方

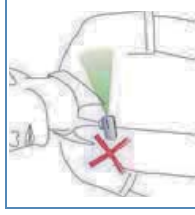


←マイクが口元を向いていない

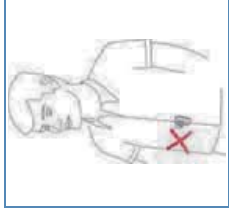

マイクロホンが口元から離れている→

## 9. ネットストラップの使い方

クリップで留めることが難しい場合は、付属のネットストラップを使用します。

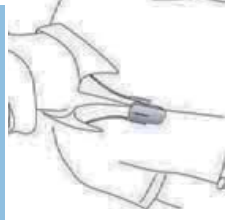

## ロジャー クリップオンマイクへの取り付け方法

ネットストラップを、ロジャー クリップオンマイクのクリップにしっかりと狭め込みます。



取り外す場合は逆の手順を行います。



## 装着方法

ネックストラップはジョイント部分で左右に切り離すことができます。首に掛けるとき、外すときは、ジョイント部分を切り離してください。



長さの調整もジョイント部分で行います。



## 10. ミュート

ロジャー クリップオンマイクを使用中、聞き手に首声を聞かせたくない時に一時的にミュート (マイクロホン無効) にすることができます。



電源ボタン を押すとミュートになります。

解除するにはもう一度電源ボタン を押します。

## 11. ロジャー クリップオンマイクのリセット

ロジャー クリップオンマイクが何らかの原因で反応しなくなったり、動作が不安定になったりした場合は、リセットを行うことで回復することができます。  
リセットは、電源ボタン と追加ボタン を同時に 7 秒間長押ししてください。

## 12. インジケータの表示

インジケータ表示	内容
	電源オン
	動作中表示
	電源オフ
	外部入力
	ミュート
	充電中
	充電完了
	要充電
	MTN 親機が見つかりません。

- 親機となるロジャー送信機のスイッチを入れ、使用可能な範囲内にあることを確認してください。
- 現在のネットワークを破棄して、新しいネットワークを開始したい場合は、インジケータがオレンジ色に変わるまで、追加ボタン を 7 秒長押ししてください。新しいネットワークで使用するには、ロジャー クリップオンマイクとロジャー受信機をもう一度ネットワークに追加してください。

## 13. トラブルシュート

### 電源が入らない

- 充電してください。

### 話し声はつきりと聞こえない

- マイクロホンを話し手の口元に近付けてください。
- マイクロホンの穴を手で覆わないようにしてください。
- ロジャー クリップオンマイクと受信機の距離を近づけてください。

### 電源がオンになっているのに音声が聞こえない

- マイクロホンがミュートになっている場合、解除してください。
- 受信機が補聴器および人工内耳にしっかりと接続されていることを確認してください。
- 補聴器および人工内耳を、Roger が使えるプログラム (Roger/FM+M または T コイル+M など) に切り替えてください。
- 受信機をロジャー クリップオンマイクの 10cm 以内に近づけ、追加ボタン を押してください。
- MTN を使用している場合、親機の電源がオンになっていることを確認してください。

### 音声が届かない

- ロジャー クリップオンマイクと受信機の距離を近づけてください。
- ロジャー クリップオンマイクと受信機の間に障害物がなく、見通せる範囲で使用してください。

### 外部入力端子からの音量が小さい

- 外部入力に接続した機器のボリュームを調節してください。

### ロジャー クリップオンマイクが作動しない

- リセットしてください。

## 14. 保証期間とアフターサービス

保証期間とアフターサービスについては、「安全上のご注意」をご覧ください。

## Memo

販売店名

製造販売業

ソノヴァ・ジャパン株式会社

〒140-0002

東京都品川区東品川 2-5-8

天王洲パークサイドビル

TEL0120-06-4079 (お客様相談窓口)

FAX0120-23-4080

[www.phonak.jp](http://www.phonak.jp)

