

デジタルワイヤレス補聴援助システム Roger

ロジャー・マイリンク

Roger MyLink

取扱説明書



はじめに

このたびはフォナックのデジタルワイヤレス補聴援助システム Roger (ロジャー) をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

Roger MyLink は補聴器または人工内耳プロセッサに内蔵されている T コイル (誘導コイル) を利用する Roger 受信機で、Roger 送信機と一緒に使用します。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

- お使いになる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 以下に示した注意事項は、お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載しておりますので、必ずお守りください。
- 以下の表示区分は、表示内容を守らず、誤って使用した場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

△ 危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
△ 警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
△ 注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「傷害を負う可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

Roger MyLink、充電電池の取り扱いについて

△ 危険

- 必ず弊社が指定した充電電池を使用してください。指定以外の充電電池を使用した場合、Roger MyLink や充電電池、その他の機器を漏液、発熱、破裂、発火、故障させる原因となります。
- 分解、改造をしないでください。火災、けが、感電などの事故または故障の原因となります。
- 濡らさないでください。発熱、感電、火災、故障、けがなどの原因となります。使用場所、取り扱いに注意してください。

- 火のそばや、直射日光の強いところ、炎天下の車内など高温の場所で使用、放置しないでください。機器の変形、故障や、内蔵充電電池の漏液、発熱、破裂、発火、性能や寿命の低下の原因となります。

△ 警告

- 強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。充電電池の漏液、発熱、破裂、発火や機器の故障、火災の原因となります。
- 所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をやめてください。漏液、発熱、破裂、発火の原因となります。
- 使用中や充電中、保管時に、異臭、発熱、変色、変形など、今までと異なる症状がある際には、直ちに以下の作業を行ってください。そのまま使用すると発熱、破裂、発火または充電電池の漏液の原因となります。
 1. 電源プラグをコンセントから抜く。
 2. Roger MyLink の電源を切る。
- 航空機内など電子機器の使用を禁止された区域では一緒に使用する送信機の電源を切ってください。電子機器や医療用電気機器に影響を与える場合があります。病院など電波を発する機器の使用に制限がある場所では各機関の指示に従ってください。
- ペースメーカーなど医療機器の装用者が Roger MyLink を使用する際は医療機器製造会社や医師の指示に従ってください。

△ 注意

- 湿気やほこりの多い場所や高温になる場所には置かないでください。
- 充電の際に Roger MyLink や AC アダプタの温度が高くなる場合があります。

AC アダプタの取り扱いについて

△ 警告

- 充電の際には Roger MyLink 専用の AC アダプタを使用してください。
- 濡れた手で AC アダプタのコード、コンセントに触れないでください。感電の原因となります。
- 濡らさないでください。発熱、感電、火災、故障、けがなどの原因となります。使用場所や取扱いに注意してください。
- 風呂場などの湿気の多い場所では使用しないでください。感電の原因となります。
- 長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。感電、火災、故障の原因となります。

- コンセントにつながれた状態で、充電端子に手や指など体の一部に触れさせないでください。感電、傷害、故障の原因となります。
- AC アダプタをコンセントに差し込むときは、金属類に触れさせないように注意し、確実に差し込んでください。感電、ショート、火災の原因となります。
- 指定の電源、電圧で使用してください。誤った場合、火災、故障の原因となります。
- 電源プラグについたほこりは抜き取ってください。火災の原因となります。
- 充電中、雷が鳴り出したら、Roger MyLink、AC アダプタには触れないでください。落雷、感電の原因となります。
- 充電中は、AC アダプタを安定した場所に置いてください。AC アダプタを布で覆ったり、包んだりしないでください。

△ 注意


- AC アダプタをコンセントから抜く場合はコードを引っ張らず、電源プラグを持って抜いてください。感電、火災、故障の原因となります。
- AC アダプタのコードや電源コードの上に重いものを載せたりしないでください。感電、火災の原因となります。

その他の注意事項

- ループ補聴援助システムの電源がオンになっている部屋に入るときは Roger MyLink の電源をオフにしてください。
- お手入れの際は水や洗剤を使用しないでください。
- 専用の付属品を使用してください。
- Roger MyLink の修理はソノヴァ・ジャパンまたはソノヴァ・ジャパンの指定するサービスセンターでのみ可能です。
- お客様による Roger MyLink の充電電池交換はできません。充電電池を取り外さないでください。
- 日本国内で購入した Roger MyLink が海外の各国で使用可能かどうかは、事前にその国の関係省庁にお問い合わせください。また、海外で購入した Roger MyLink を国内で使用すると電波法違反となる恐れがあるのでご注意ください。

1. 本体付属品

- Roger MyLink

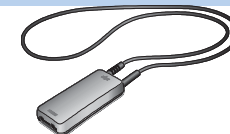


- AC アダプタ



- 取扱説明書 (本書)
- 保証書 / 国際保証書

2. 各部の名称

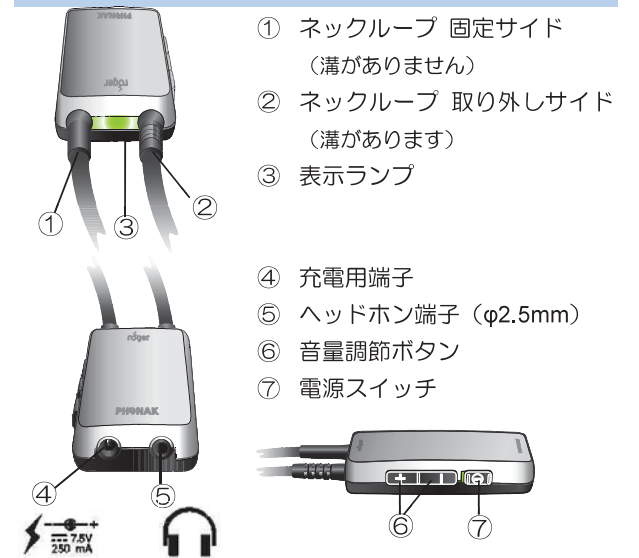

- ① ネックループ 固定サイド (溝がありません)
- ② ネックループ 取り外しサイド (溝があります)
- ③ 表示ランプ
- ④ 充電用端子
- ⑤ ハッドホン端子 (φ2.5mm)
- ⑥ 音量調節ボタン
- ⑦ 電源スイッチ

3. Roger MyLink の充電

Roger MyLink には繰り返し充電が可能なりチウムポリマー充電電池が内蔵されています。Roger MyLink の充電時間、使用可能時間は以下の通りです。

充電時間	約 2 時間
使用可能時間	約 10 時間

充電方法


1. 付属の AC アダプタの電源プラグをコンセントに差し込みます。



2. Roger MyLink の充電用端子に AC アダプタのコネクターを接続します。表示ランプが 5 秒ごとに 2 回ずつ緑色に点滅します。
3. 表示ランプが緑色の常時点灯に変わったら充電完了です。AC アダプタを接続したままでも充電電池は過充電されません。

- ※ 必ず付属の AC アダプタを使用してください。
- ※ Roger MyLink を充電しながら使用することはできません。

4. 表示ランプの説明

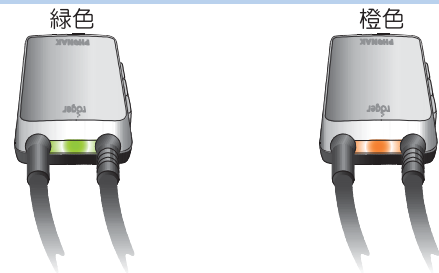

表示ランプと Roger MyLink の状態


	ランプ表示	状態
電源	電源オン時 3秒間点灯後消灯 	使用可能です
電池残量	60秒ごとに3回ずつ点滅 	1時間以内に充電してください
	10回点滅後ピーブ音 	すぐに充電してください
充電	5秒ごとに2回ずつ点滅 	充電中です
	常時点灯 	充電完了です
音量	1回点滅 	音量が最大(または最小)です
	1回点滅 	音量が真ん中です

5. Roger MyLink の装着方法

1. ネックループを取り外しサイドからネックループを抜きます。



2. ネックループを聞き手の首にかけて、ネックループを取り外しサイドに差し込みます。

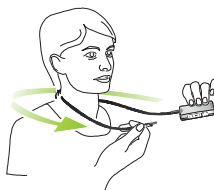

- ※ ネックループを急に抜くと断線する恐れがあります。溝の部分を手に持って丁寧に引き抜いてください。
- ※ ネックループ固定サイドは抜けません。

6. Roger MyLink の使用方法

1. Roger MyLink の電源をオンにします。緑色のマークが見えます。




2. 補聴器または人工内耳プロセッサをTコイルが利用できるプログラムに切り替えます。
3. 話し手は Roger 送信機を装着して、電源をオンにします。初めて使用する際は、Roger 送信機を操作して、Roger 受信機をネットワークに追加します。
4. 話し手は普段通りの声の大きさとスピードで話しかけてみてください。聞き手の反応を見ながら送信機から音声がきちんと届いているかどうかを確認してください。

- ※ 別の Roger 送信機と一緒に使用する場合は、一緒に使用する Roger 送信機を操作して、Roger MyLink をネットワークに追加しなおしてください。

7. Roger MyLink の音量調節

Roger MyLink には音量調節ボタンがあり、送信機からの音量をお好みの大きさに調節できます。音量を小さくしたいときは Roger MyLink の音量調節ボタンの「-」を押します。反対に音量を大きくしたいときは音量調節ボタンの「+」を押します。

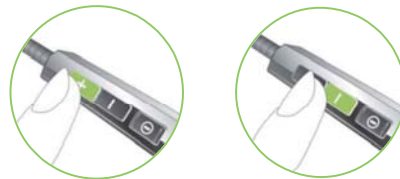


- ※ 設定した音量は Roger MyLink の電源がオフになっても維持されます。

8. ヘッドホンの接続

Roger MyLink は市販のヘッドホン (φ2.5mm ステレオピンプラグ) を接続し、補聴器を使用していない方でもヘッドホンを介してご利用いただけます。

1. Roger MyLink のヘッドホン端子にヘッドホンのプラグを接続します。
2. Roger MyLink の電源をオンにし、ヘッドホンを目にあてます。ヘッドホンを接続したときも Roger MyLink の音量調節ボタンで音量の調節が可能です。

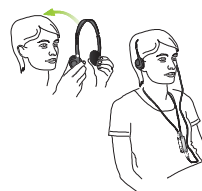

- ※ Roger MyLink にヘッドホンが接続されると、ネックループは利用不可になります。
- ※ 周囲の音が聞こえにくくなるため、屋外で使用する際は特にご注意ください。

9. トラブルシューティング

Roger MyLink の電源をオンにしても表示ランプが緑色に点灯しない。

- 電池が切れている可能性があります。Roger MyLink を充電してください。

Roger MyLink と Roger 送信機の電源がオンになっているのに、話し手の声がまったく聞こえない。

- 補聴器または人工内耳プロセッサのプログラムがTコイル用プログラム (MT もしくは T) に切り替わっていない可能性があります。Tコイル用プログラムに切り替えているかどうか確認してください。
- ネックループを正しく差し込んでください。
- 一緒に使用する送信機が Roger 送信機であるか確認してください。
- ネットワークに追加されていない可能性があります。もう一度、Roger 送信機から Roger MyLink をネットワークに追加してください。

話し手の声が途切れる。

- Roger 送信機と Roger MyLink の距離が離れすぎている可能性があります。室内で Roger を安定して使用できる距離は送信機により異なりますがおおよそ 10~15m です。Roger 送信機と Roger MyLink の距離を近づけてください。

ピッポツというピーブ音が鳴り続ける

- Roger MyLink は一緒に使用している送信機との通信が途切れる (電源がオフになった、または通信範囲外になった) と、ピーブ音 (ピッポツ) でお知らせします (ファームウェア Ver.1.7 以降対象)。このピーブ音は機械の異常ではありません。

10. 保証期間とアフターサービス

日本国内における保証期間

日本国内における本製品の無償保証期間は、お買い上げ日より2年間です。無償修理の際、保証書が必要になりますが、製品に同梱されている保証書に「販売店名」、「お買い上げ日」の記載があることを確認の上、大切に保管してください。

Local Warranty

Please ask the hearing care professional, where you purchased your hearing aid, about the terms of the local warranty.

日本国外における保証期間 (国際保証)

日本以外の国における本製品の無償保証期間は、お買い上げ日より1年間です。保証対象はアクセサリパーツを除く機器本体となります。国際保証書に「販売店名」、「お買い上げ日」の記載があることを確認の上、大切に保管してください。

当規定は上記の修理保証規定により交換・修理をお約束するものであり、法律上のお客様の権利を制限するものではありません。

International Warranty

Phonak offers you a one year limited international warranty valid starting from the date of purchase. This limited warranty covers manufacturing and material defects in the hearing aid itself, but not accessories such as batteries, tubes, ear modules, external receivers. The warranty only comes into force if a proof of purchase is shown. The international warranty does not affect any legal rights that you might have under applicable national and legislation governing sale of consumer goods.

保証適用除外

お客様または第三者の誤った使用・過失・改造による故障および損傷に対しての修理に関しては、保証期間内であっても保証適用外となります。修理は、ソノヴァ・ジャパンが指定するサービスセンターでのみ行ってください。また、専門家による調整やアフターケア等のサービスに対しても、保証対象ではありません。

Roger MyLink の充電電池交換は有償となります。充電電池交換希望の際は販売店までお問い合わせください。

Warranty Limitation

This warranty does not cover damage from improper handling or care, exposure to chemicals or undue stress. Damage caused by third parties or non-authorized service centers renders the warranty null and void. This warranty does not include any services performed by a hearing care professional in their office.

本製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一部を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

製造販売業

ソノヴァ・ジャパン株式会社

〒140-0002 東京都品川区東品川 2-5-8

天王洲パークサイドビル

TEL 0120-06-4079 (お客様相談窓口)

FAX 0120-23-4080

www.phonak.jp

