

はじめに・・・準備をするもの



1. 補聴器

2. 充電ケース(チャージャーケース BTE)



マイクロホン音口
音の入り口です。

プログラムスイッチ
プログラムを切り替えます。

フック
音の通り道です。



ブラシ
レシーバ掃除用ブラシです。

乾燥剤入れ
ドライカプセルを入れます。

補聴器挿入口
ここに挿して充電します。

はじめにお読みください

フォナック クイックガイド

耳かけ型 — 入門編 —
(充電式・標準タイプ)

ステップ 1 スイッチを押して電源を入れてみましょう！




1

補聴器を充電ケースに挿し、充電します。
(点滅が点灯に変われば充電完了です)



2

充電ケースから補聴器を取り出します。

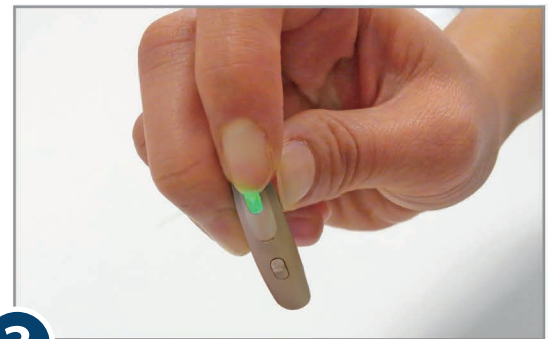

3

スイッチを長押し(約3秒間)します。
電源が入ると、スイッチが一瞬光ります。

ステップ 2 補聴器を耳につけてみましょう！



1

イヤモールドの付け根(エルボー)部分を摘まみます。



2

イヤモールドの先端を耳穴に差し込み、後ろに回しながら入れます。



3


補聴器本体を耳にかけます。

取り出す時



○

イヤモールドの付け根(エルボー)部分を摘まんで取り外します。

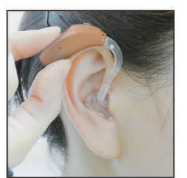

×

補聴器本体を持って外さないでください。

ステップ 3 使用(練習)してみましょう！



練習1 ひとりで
～3日間

家の静かな場所で練習してみましょう。



練習2 ふたりで
～1週間

1対1での会話で楽しんでみましょう。



練習3 お部屋で
～2週間

テレビやラジオを聴いてみましょう。



練習4 外出先で
～1ヶ月間

色々な音がする外で会話を楽しんでみましょう。