


お手入れ 1 お掃除の仕方

補聴器を長くお使いいただくために、日ごろからの
お手入れをおすすめします。

毎日のお掃除編



1 柔らかい素材の布で表面の
汚れをふき取ります。

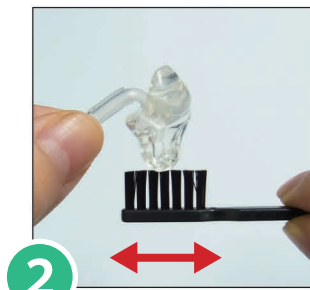

2 音の出口を下に向けブラシ
をかけて、耳垢等を払い
落とします。

お掃除にはこれがオススメ!

補聴器クリーナー

30袋入り 1,500円(税抜)

補聴器に付着する汗、皮脂、
耳垢の汚れ、ニオイ、菌が、
軽く拭だけで取れると同時に、
防菌・防臭成分が付着して
キレイを長時間保ちます。



別売

- エアパッファー 840円(税込)
- イヤモールド洗剤(20粒入) 840円(税込)
- イヤモールド洗剤カップ 840円(税込)

月に1〜2度編

より衛生的にお使いいただくためには、月に1〜2度はイヤモールドを洗淨しましょう!



1 イヤモールド洗淨剤を1粒、
袋から出します。



2 イヤモールド洗淨カップ
の中に洗淨剤を入れます。



3 内ケースを置いてから、
カップに150mlの水を
入れて、イヤモールドも
入れます。

この時
蓋は閉めないでください。

洗淨剤は5〜6分ほどで
水に溶けてなくなりますが、
イヤモールドはそのまま
15分以上浸け置き
ください。ただし、8時間
以上の浸け置きはおや
めください。



4 イヤモールドは水洗いし、水気
を拭き取ります。チューブの中
の水は、エアパッファーを使っ
て吹き飛ばしてください。

お手入れ 2 保管の仕方

補聴器にとって湿気は大敵です。特に夏場は外気の湿気から
補聴器を保護するためにもドライカプセルをお使いください。



1 チャージャーケース BTEに
ドライカプセルを裏面シール
を剥がさずに入れます。



2 蓋をしっかりと閉じます。

ドライカプセル(乾燥剤)の交換時期



ドライカプセルが新しい
ときは鮮やかなオレンジ色。



くすんで半透明に変わったら、
ドライカプセルの交換時期。

防水防塵IP68 補聴器のご使用およびお手入れ時の注意点



ポイント

補聴器が濡れている場合は、充電する前に
しっかり水気を拭き取ってから充電ケースに入れてください。

IP68を取得した補聴器は、防水・防塵性能を持ちます。
防水・防塵性能を維持するために、
補聴器の動作の異常の有無に関わらず
1年に1度のメーカーによるメンテナンスをおすすめします。

こんな時には使わないでください

- × 強い水流や強い水圧がかかるような場合
(サーフィン、ジェットスキー等の海のアクティビティー、洗濯機、
超音波洗淨機など)
- × 高音もしくは低温の環境条件の場合
(サウナでの使用、車のダッシュボードに置く、冷蔵庫の中での
保管、ドライヤーの温風)
- × 整髪や散髪の時
(整髪料、ヘアスプレーの付着など)

フォナック製品のご相談・ご用命は・・・

フォナック

www.phonak.jp

ソノヴァ・ジャパン株式会社
〒140-0002 東京都品川区東品川 2-5-8 天王洲パークサイドビル
TEL: 0120-06-4079
(お客様相談窓口 受付時間: 月～金 9:00～17:30 土日祝休み)
FAX: 0120-23-4080

PHONAK
life is on