

# デジタルワイヤレス補聴援助システム Roger ロジャー クリップオンマイク Roger Clip-On Mic 取扱説明書 (操作編)



## はじめに

このたびはフォオナックのデジタルワイヤレス補聴援助システム Roger (ロジャー) をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご利用の前に本取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとは大切に保管し、必要なおきに読みください。

**別紙「安全上のご注意」も必ずお読みください**

## 1. 本体付属品



- ・クイックガイド
- ・取扱説明書 (本書)
- ・安全上のご注意
- ・保証書

## 2. 各部の名称



## 3. ロジャー クリップオンマイクの準備

1. ロジャー クリップオンマイクを充電する  
ロジャー クリップオンマイクには繰り返し充電が可能なり  
チウムポリマー充電池が使用されています。
2. 充電方法  
充電スタンドに AC アダプターを接続し、ロジャー クリッ  
オンマイクを差し込みます。
  - ・ ACアダプターにつないだままにいても、ロジャー クリップオ  
ンマイクのバッテリーは過充電されません。
  - ・ 充電中もロジャー クリップオンマイクを使用できます。

## 3. 電池残量



AC アダプターを直接ロジャー  
クリップオンマイクに接続する  
こともできます。

3. 充電が必要になると、インジケーターが赤く点滅して通知し  
ます。詳しくは「12.インジケーターの表示」をご覧ください。

## 4. ロジャー クリップオンマイクの基本性能

**充電池について**  
使用可能時間：約 4.5 時間 充電時間：約 2 時間

### 使用可能距離について

- 通常の使用 室内：約 15m / 屋外：約 10m
- ・ ネットワーク追加・受信機手エックは送信機から 10cm 以内に  
行ってください。
  - ・ 高出力の電気製品が近くにある場合や金属に囲まれた部屋な  
どでは使用可能距離が短くなる場合があります。
  - ・ 室内で安定して使用することができ距離は約 10m です。
  - ・ 装着する人の体が電波を遮り、ロジャー クリップオンマイク  
からの音が途切れることがあります。このような場合は、ロジ  
ャー受信機の方向に体を向けて使用してください。

## 5. ボタンの扱い方

本書でのボタン操作は以下のとおりです。

- ・ ボタンを押す ボタンを短く一回押す
- ・ ボタンを○回押す ボタンを指定された回数繰り返し押し
- ・ ボタンを長押しする 特定の動作を始めるまで (2~3秒ま  
たは指定の長さ) 押し続ける

## 6. ロジャー クリップオンマイクの使用法

### 基本的な使い方

あらかじめ、補聴器・人工内耳およびロジャー受信機を使用可能に  
しておきます。補聴器・人工内耳およびロジャー受信機の取扱説明  
書もあわせてご参照ください。

1. 電源を入れる  
電源ボタン を長押しして、電源をオンに  
します。インジケーターが白く一点灯 (●)  
します。
2. ロジャー受信機をネットワークに追加する  
受信機から 10 cm 以内の距離で、ロジャー ク  
リップオンマイクの追加ボタン を押  
すと受信機がネットワークに追加されます。  
結果はインジケーターに表示されます。

## 2 台以降 (子機) として使用したいロジ

ャー送信機から 10 cm 以内の距離で、1 台  
目 (親機) のロジャー クリップオンマイ  
クの追加ボタン を押し、マイク  
ホンがネットワークに追加されます。

複数のロジャー クリップオンマイクを使用す  
る場合、親機の目印としてステッカーを使用す  
ると便利です。



- ・ ネットワークに追加されたマイクrohンは1台ずつしか音が飛ばない  
ように設計されています。親機と子機で優先順位の差はありません。
- ・ ロジャー クリップオンマイクに追加できるマイクrohんは、ロジヤ  
ークリップオンマイクのみです。ロジャークリップオンマイクが子  
機であればロジャー ペン、ロジャー セレクト、ロジャー テーブル  
マイクIIとネットワークを組むことができます。

### 新しいネットワークを作成する

追加ボタン を 7 秒以上押すと現在のネットワークを  
破棄し、新しいネットワークを作ることができます。新しい  
ネットワークを作成した時点で、そのロジャー クリップオン  
マイクはネットワークから離脱します。

## 7. 外部音響機器との接続 (外部入力端子)

**充電スタンドを使用する**  
テレビなど、決まった場所で使用する音響機器と接続する場合は、  
充電スタンドの外部入力端子を使用すると便利です。

充電スタンドの外部入力端子を、  
音響機器の音声出力端子 (ヘッドフ  
ォン端子等) に接続します。



必要に応じて、オーディオプラグ  
変換ケーブルを使用してください。

充電スタンドに AC アダプターが接続されていれば、ロジャー  
クリップオンマイクの電源がオフの場合でも、外部入力を感知して  
自動的に電源が入ります。

### ロジャー クリップオンマイクの USB 端子に接続する

モバイル機器など、手元に置いて使用する機器  
と接続する場合は、ロジャー クリップオン  
マイクのマイクroh USB 端子を使用します。



### (インジケーター表示)


**接続成功**  
受信機が見つかりません  
互換性のない機器です  
ネットワークへの追加は最初一回だけです。一度ネットワ  
ークに追加したマイクは、電源を入り切りしてもネットワー  
クに参加し続けます。  
受信機が複数ある場合は、受信機一台ずつネットワークに追  
加する作業を行います。

3. マイクrohんに向かって話す  
ロジャー クリップオンマイクからの音が聞こえているかを  
確認するには、マイクrohんを軽く指でこすり、擦った音が  
ロジャー受信機装用者に聞こえているかを確認します。

4. 終了する  
ロジャー クリップオンマイクの電源をオフにするには、電源  
ボタン を長押しします。

### 複数のマイクrohんを使用する


ロジャーでは複数のマイクrohんを同  
じネットワークに追加することが出来  
ます。これを MTN (マルチ・トーカー・  
ネットワーク) と呼び、最大 10 台のマ  
イクrohんを使用できます。

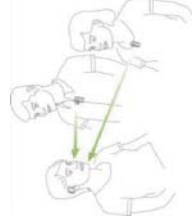

まずアナログ音声ケーブルと音響機器を接続し、次にロジャー クリップオンマイクのマイク USB 端子にケーブルを接続します。いずれの方法でも、外部入力の音声が入っている間は、ロジャー クリップオンマイクのマイクは無効になります。


## 8. ロジャー クリップオンマイクの使用スタイル

ロジャー クリップオンマイクは胸元に取り付け、口元から 15cm 以内の場所で使用します。衣服のデザインに合わせて様々な留め方が可能です。

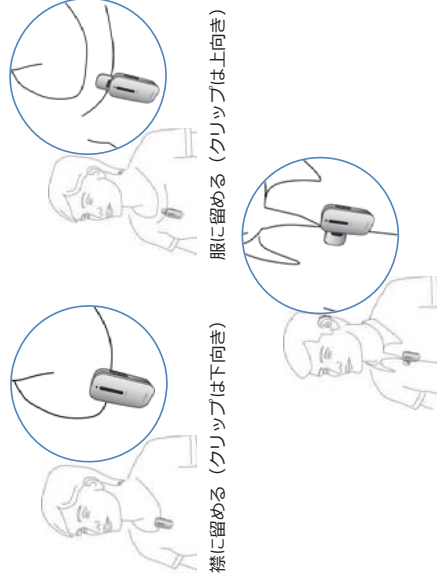

ボタンとボタンの間に留める (クリップは横向き)


誤った留め方

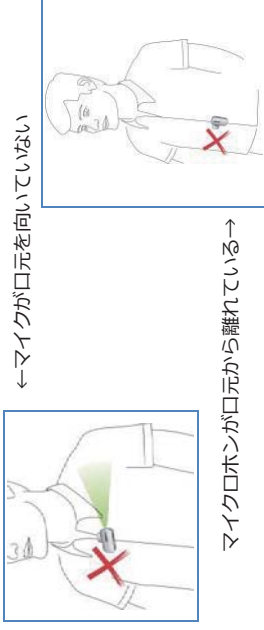

←マイクが口元を向いていない

マイクが口元から離れている→

## 9. ネックストラップの使い方

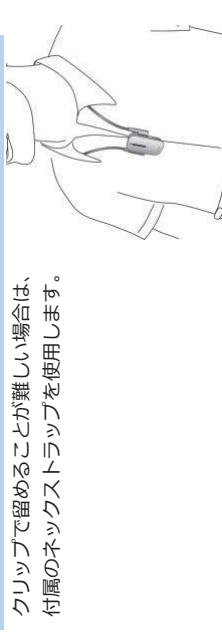

クリップで留めることが難しい場合は、付属のネックストラップを使用します。

## ロジャー クリップオンマイクへの取り付け方法



ネックストラップを、ロジャー クリップオンマイクのクリップにしっかり挟み込みます。



取り外す場合は逆の手順を行います。



## 10. ミュート

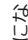ロジャー クリップオンマイクを使用中、聞き手に首声を聞かせたくない時に一時的にミュート (マイクロホン無効) にすることができます。

電源ボタン  を押すとミュートになります。解除するにはもう一度電源ボタン  を押します。



## 11. ロジャー クリップオンマイクのリセット

ロジャー クリップオンマイクが何らかの原因で反応しなくなったり、動作が不安定になったりした場合は、リセットを行うことで回復することができます。リセットは、電源ボタン  と追加ボタン  を同時に 7 秒間長押ししてください。







## 装着方法


ネックストラップはジョイント部分で左右に切り離すことができます。首に掛けるとき、外すときは、ジョイント部分を切り離してください。



長さの調整もジョイント部分で行います。

## 12. インジケータの表示

インジケータ表示	内容
	電源オン
	動作中表示
	電源オフ
	外部入力
	ミュート
	充電中
	充電完了
	要充電
	MTN 親機が見つかりません。

- 親機が使用可能な範囲内にあることを確認してください。
- 現在のネットワークを破棄して、新しいネットワークを開始したい場合は、インジケータがオレンジ色に変わるまで、追加ボタン  を 7 秒長押ししてください。新しいネットワークで使用するには、ロジャー クリップオンマイクとロジャー受信機をもう一度ネットワークに追加してください。

## 13. トラブルシュート

- 電源が入らない
  - 充電してください。

## 14. 保証期間とアフターサービス

保証期間とアフターサービスについては、「安全上のご注意」をご覧ください。

## Memo

販売店名

製造販売業  
ソノヴァ・ジャパン株式会社  
〒140-0002  
東京都品川区東品川 2-5-8  
天王洲パークサイドビル  
TEL0120-06-4079 (お客様相談窓口)  
FAX0120-23-4080  
[www.phonak.jp](http://www.phonak.jp)



**PHONAK**  
life is on