

# Roger Clip-On Mic

ロジャー クリップオンマイク

## クイックガイド



roger

PHONAK  
life is on

### はじめに

#### 本体および付属品

ロジャー クリップオンマイク  
本体



ネックストラップ



充電スタンド



ポーチ



ACアダプター



オーディオプラグ  
変換ケーブル



ミニピンプラグ・  
オーディオケーブル



ミニピンプラグ・  
マイクロ USB ケーブル




★  
ステッカー

### 1

#### 充電スタンドのセッティング




AC アダプターは専用のケーブルをお使いください。

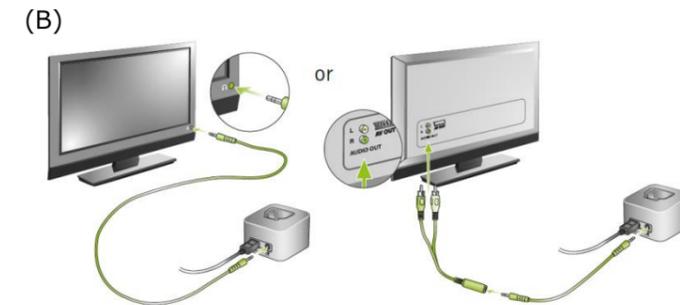

テレビの音声の外部出力の端子形状に合わせてケーブルを使い分けてください。

### 2

#### ロジャー クリップオンマイクの充電

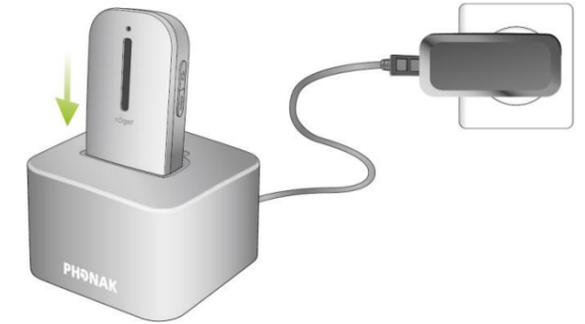

フル充電にかかる時間は最大 2 時間です。

### 3

#### ロジャー クリップオンマイクの電源オン




2 秒 長押し

電源ボタンを 2 秒長押しして電源オンにします。

### 4

#### Roger 受信機をネットワークに追加

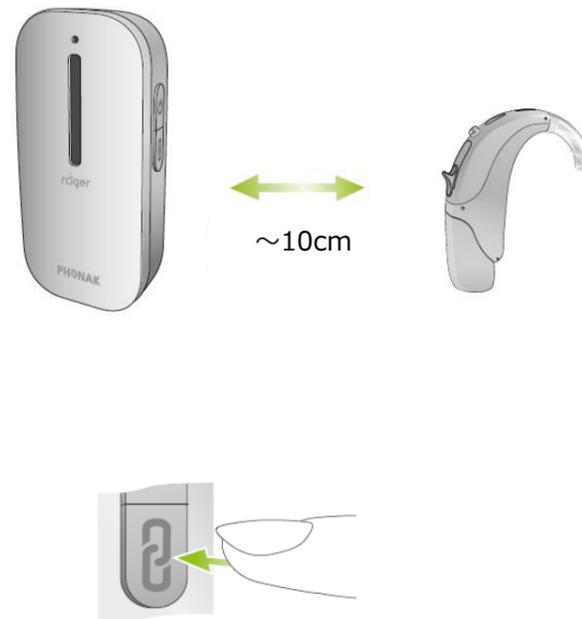


~10cm


### 5

#### ロジャー クリップオンマイクの使い方

マイクの向きにはご注意ください！

口元からロジャー クリップオンマイクまでの距離は 20cm 以内でお使いください。

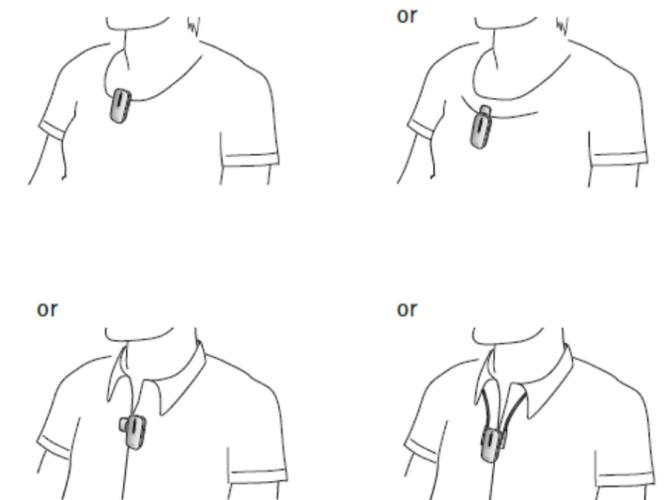

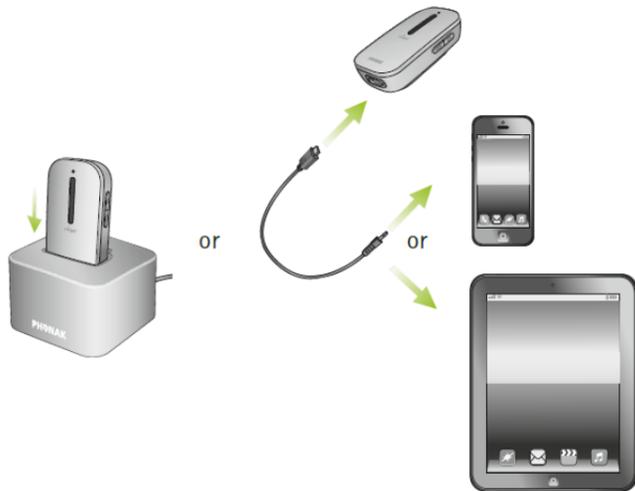**マルチメディアプレーヤーに接続して使用**

充電スタンドに取り付けて、マルチメディアからの音声を聞き取る場合は、充電も同時に行われます。  
外出時は、付属のミニプラグ-マイクロ USB ケーブルを使用してお使いください。

**ロジャー クリップオンマイクの電源オフ**

ご使用になられない時は本体の電源をお切りください。

**ロジャー クリップオンマイクのミュート設定**

電源ボタンを短く1回押しますと、マイクがミュート状態に切替わります。  
ミュート状態に切り替わった際にインジケータが、紫色に点灯します。

ミュート解除する場合は、再度電源ボタンを短く1回押してください。

**LED インジケータとロジャー クリップオンマイクの状況**

-  : ミュート状態 (マイク オフ)
-  : 充電中
-  : 充電完了
-  : ネットワーク中の親機と未接続  
親機である Roger 送信機の電源を  
オンにしてください
-  : 電池残量が少ない  
充電が必要です

製造販売業  
ソノヴァ・ジャパン株式会社  
〒140-0002  
東京都品川区東品川 2-5-8  
天王洲パークサイドビル  
TEL0120-06-4079 (お客様相談窓口)  
FAX0120-23-4080  
www.phonak.jp