




Phonak RemoteMic


User Guide



PHONAK
life is on


명칭설명

- ① 볼륨 + / 페어링 ()
- ② 볼륨 - ()
- ③ 전원 버튼 ()
- ④ 충전 입력부 (mini-USB)
- ⑤ 마이크로폰
- ⑥ 상태 표시등
- ⑦ 탈착식 연결고리 연결부
- ⑧ 고정 클립

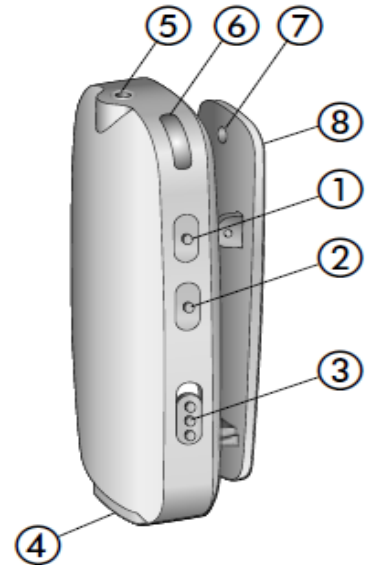

액세서리

- 듀얼 미니-USB 스플리터 (1 in/2 out)
- 탈착식 연결 고리
- 보호용 파우치

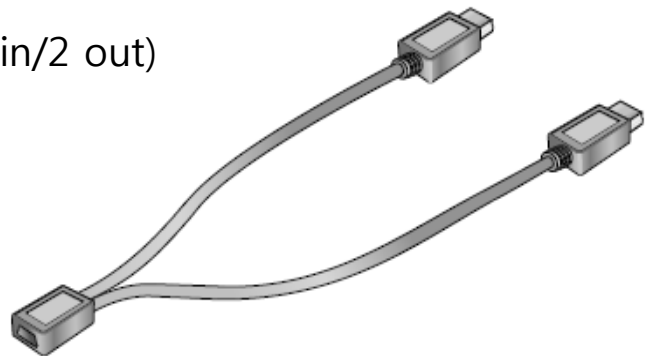

리모트마이크 사용 준비

리모트마이크 충전하기

- RemoteMic는 내장식 배터리 형태이므로, 처음 사용할 경우에는 최소 3시간 충전할 것을 권장합니다.



리모트마이크 충전방법

1. 포낙 컴파일럿의 전원장치를 켭니다.
2. 전원소켓에 전원공급장치를 연결합니다.
3. 미니-USB 플러그를 리모트마이크 미니-USB 소켓에 넣는다.
4. 상태표시등이 초록색으로 변하면 충전이 완료된 것입니다.

**** 장시간 충전 하지 마시기 바랍니다.**

두 개의 장치로 전원 공급 가능


1. 컴파일럿과 리모트마이크를 동시에 충전합니다.
2. 티비링크S를 사용하는 동안에도 리모트마이크는 충전이 가능합니다.

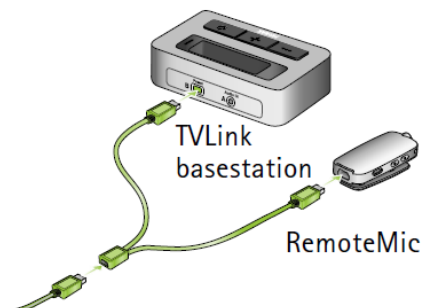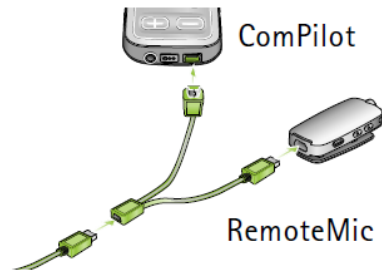

리모트마이크 페어링

리모트마이크 켜기/끄기

- 그림 방향으로 스위치를 돌려서 켜고 끄십시오.

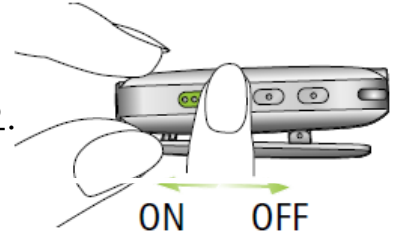

컴파일럿과 페어링하기

- 리모트마이크를 처음 사용 할 때는 반드시 사용할 장치와 페어링을 해야 합니다.

1. 컴파일럿 스위치를 켭니다.
2. 컴파일럿의 (<>)와 (+)버튼을 동시에 2초간 누르면 파란색이 빠르게 깜빡일 것입니다.




Press (<> / +) for 2 secs

- * 컴파일럿은 페어링 모드가 된 이후 2분간 페어링 상태가 유지됩니다.

(컴파일럿의 페어링모드가 유지된 상태에서)

3. RemoteMic의 전원 스위치를 끕니다.
4. 볼륨+ 버튼(+)을 길게 누릅니다.
5. 볼륨+ 버튼(+)을 길게 누르는 상태로 리모트마이크의 전원을 켭니다.

- * 컴파일럿과 리모트마이크는 1m 이내에 놓여있어야 합니다.

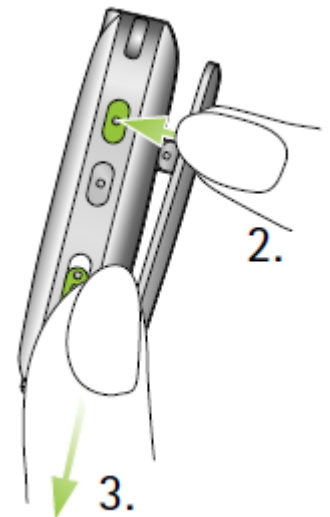

상태 표시등

작동 시, 상태 표시등



	리모트마이크 상태표시등	컴파일럿 상태표시등
페어링장치 검색 중		
스트리밍 중		
정지 모드		
페어링 모드		

전원 및 배터리 정보

	리모트마이크 상태표시등
켜 때	
꺼 때	
충전 중	
충전 완료	
배터리 없음	
절전모드 또는 꺼짐	

전화/TV와의 사용

전화기와 리모트마이크 사용 시

- 컴파일럿과 전화기가 페어링 되어있다면, 리모트마이크 사용 하는 도중에도 전화를 받을 수 있습니다. 예를 들어, 수신 전화가 울리면 컴파일럿은 자동적으로 리모트마이크로부터 오디오 신호 전송을 멈추고 전화기의 오디오 신호를 보청기에 전송합니다.




TV와 리모트마이크 사용 시

- 여행을 떠났거나 외출 중이라서 아날로그 TV-audio 신호를 사용할 수 없는 경우, 리모트마이크 TV의 음질향상에 도움을 줍니다.
1. TV 스피커로부터 20cm이내에 리모트마이크를 위치시킵니다.
 2. TV를 시청하는 동안에는 충전기를 빼놓는 것을 권장합니다.



RemoteMic 

다중 음원 사용 시, 프로그램 순서

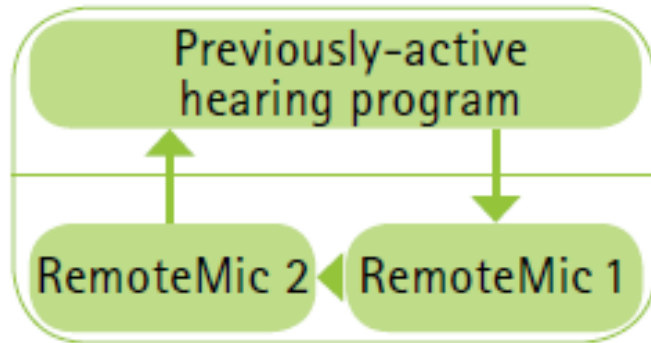

1대의 컴파일럿에 2대의 리모트마이크 2개의 페어링할 수 있으나, 동시 사용은 불가능합니다. (동시 스트리밍 불가능) 컴파일럿의 메인버튼을 사용하여 순차적으로 사용이 가능합니다.

메인버튼을 누를 때, 컴파일럿은 순서대로 리모트마이크를 선택합니다.

** 휴대전화가 컴파일럿에 연결되어 있을 경우에는, 한 개의 리모트마이크만 지원이 가능합니다.



Manufacturer:

Phonak AG

Laubisrütistrasse 28

CH-8712 Stäfa

Switzerland

EU Representative:

Phonak GmbH

D-70736 Fellbach-Oeffingen

Germany

www.phonak.com

CE 0678

