

## Solo-apparatuur werkend krijgen

- (1) Schakel de Roger-ontvanger(s) en de Roger Touchscreen Mic (leerkrachtmicrofoon) in.
- (2) Bij de uitlevering van de Solo is de Roger Touchscreen Mic al verbonden met de Roger ontvanger
- (3) De draadloze verbinding komt direct tot stand. De apparatuur is direct gebruiksklaar.



Aan/uit knop  
(2 sec. indrukken)

**i** Bij goed functioneren van de apparatuur hoeft de leerkracht het menu niet in te gaan!

Tijdelijk uitschakelen microfoon (bijv. bij toiletbezoek)

## Roger Touchscreen Mic

### Draagwijze microfoon (leerkracht)



Maximaal 20cm van mond

Direct ondersteuning nodig? Bel 088-6008850 (kantooruren)

### Optioneel: aansluiten op TV / PC / Digibord



Micro-USB voor opladen

Audio ingang 3,5 mm

(TV, PC, digitaal schoolbord etc.)



## Handig om te weten...

### A) Indicatorlampjes




Indicatorlampje	Betekenis
	Aan/uit
	Tijdens laden
	Volledig opgeladen
	Ingeschakeld
	Apparaat opladen



	Aan/uit
	Tijdens laden
	Volledig opgeladen
	Mute geactiveerd
	Apparaat opladen

### B) Bij twijfel functioneren van Roger ontvanger(s)

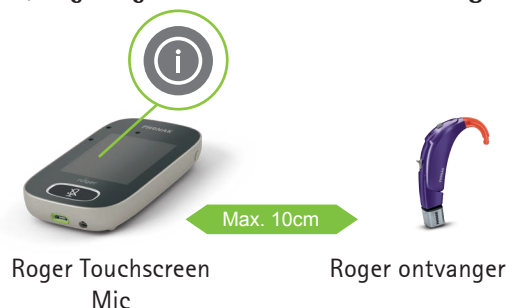

De Roger Touchscreen Mic kan de Roger ontvanger uitlezen. Dit hoeft niet dagelijks, alleen bij twijfel correct functioneren solo!

- 1) Swipe het scherm tot het pictogram **Check** zichtbaar is.
- 2) Houd de Roger ontvanger (ingeschakeld) binnen 10cm van de Touchscreen Mic en druk op **Check**.
- 3) Lees de netwerkstatus af (swipe naar beneden in het scherm). Als 'Niet verbonden', ga dan naar startscherm en kies '**Connect**' met Roger ontvanger (ingeschakeld) binnen 10cm.

### C) Toevoegen Roger Pass-around (optioneel)




De Roger Pass-around Mic is een doorgeefmicrofoon

- 1) Schakel de Touchscreen Mic en Pass-around in.
- 2) Swipe het scherm tot het pictogram **Connect** zichtbaar is
- 3) Houd de Pass-around Mic binnen 10cm van de Touchscreen Mic en druk op **Connect**

DIT HOEFT SLECHTS EENMALIG

### D) Toevoegen Roger Multimedia Hub (optioneel)

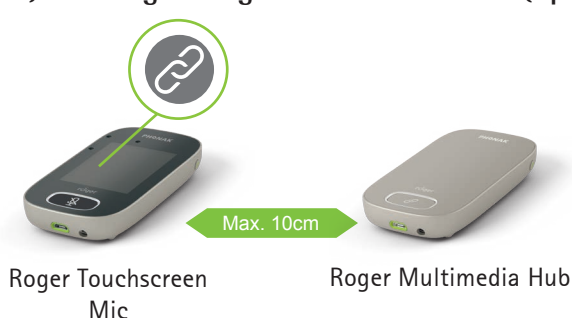

De Roger Multimedia Hub maakt het digibord hoorbaar via de solo

- 1) Schakel de Touchscreen Mic en Multimedia Hub in.
- 2) Swipe het scherm tot het pictogram **Connect** zichtbaar is
- 3) Houd de Multimedia Hub binnen 10cm van de Touchscreen Mic en druk op **Connect**

DIT HOEFT SLECHTS EENMALIG

Direct ondersteuning nodig? Bel 088-6008850 (kantooruren)