

De Roger™ DigiMaster X gebruiken

Reference Sheet

roger



Ideaal voor klaslokalen in combinatie met andere geluidsinstallaties, omdat het systeem ervoor zorgt dat elke luisteraar kan genieten van het spraakverstaan van Roger-kwaliteit. Gewoonweg aansluiten, aanzetten en lesgeven.






Eerste instelling

- Sluit de Roger DigiMaster X aan op een voedingsbron.
- Verbind de Roger DigiMaster X, met behulp van de meegeleverde audiokabel en adapter, met het versterkingsstelsel van de ruimte.
- Houd de Roger Touchscreen Mic of Roger inspiro binnen 10 cm van de Roger DigiMaster X en klik of druk op [Verbinden](#).

Dagelijks gebruik

- Druk gedurende 2 seconden op de aan-/uitknop van de Roger DigiMaster X om deze aan te zetten. Zet de Roger-microfoon aan. Praat in de Roger-microfoon.
- Druk gedurende 2 seconden op de aan-/uitknop van de Roger DigiMaster X om deze na afloop uit te zetten.

Indicatorlampje van de Roger DigiMaster X

-  Rood – Roger DigiMaster X staat uit
-  Blauw – Standaardmodus in werking
-  Knippert blauw – Roger-microfoon staat uit of is buiten bereik
-  Groen – Roger-microfoon is gedempt
-  Van groen naar rood – Het volume wordt aangepast +/-
-  Knippert geel – Software-update
-  Knippert rood – Neem contact op met [technische ondersteuning van Roger](#)

