

myPilot Snelgids

Beschrijving



- ① Aan-/uitknop ④ Mini USB-aansluiting
② Kleuren LCD-display ⑤ Reset-knop

③ Toetsen

Omhoog \triangle Volume omhoog

Omlaag ∇ Volume omlaag

Rechts \triangleright Volgend programma

Links \triangleleft Vorig programma

Midden ☰ Menu/selecteer/ZoomControl (2 sec.)/
"Home" stand (4 sec.)

PHONAK

life is on

Aan de slag

De batterij opladen

Laadt u myPilot voor de eerste keer op, doe dit dan vijf uur lang, ook als het batterijsymbool stopt met knipperen.




myPilot in- en uitschakelen

Om de myPilot in of uit te schakelen, drukt u op de Aan-/uitknop en houdt u deze ongeveer een seconde ingedrukt tot het scherm oplicht of uitgaat.




"Home" knop

Druk 4 seconden op de middelste knop  in een willekeurig scherm of menuniveau, om terug te keren naar de standaard instellingen van uw hoorsysteem en het startscherm van myPilot.

myPilot gebruiken


Mijn weergave selecteren


Om een andere Mijn weergave te selecteren, gaat u naar het menu door te drukken op de middelste knop  en vervolgens *Instellingen* te selecteren, en daarna *Mijn weergave*.

De "klassiek"-modus geeft u het meest volledige overzicht van het volume en het programma, inclusief pictogrammen van de programma's.



In de "direct control"-modus selecteert iedere toets het aangegeven programmanummer. Deze modus is alleen voor de programma- en volumeregelaar zonder toegang tot ZoomControl en het menu.

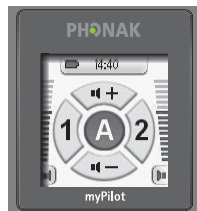



-  Het uiterlijk van de schermen van uw myPilot kan variëren, afhankelijk van de voorkeuren die zijn ingesteld door uw audicien.

myPilot gebruiken

"Klassiek"-modus

De "klassiek"-modus geeft het volledige overzicht inclusief programma- en volumeinformatie.



- Druk op de linker of rechter pijl (◀/▶) om door de luisterprogramma's te bladeren.
- Druk op de pijl omhoog/omlaag (△/▽) om het volume te wijzigen. Zie pagina 6 voor details.
- Druk kort op de middelste knop  voor toegang tot de submenu's.
- Druk 2 seconden op de middelste knop  om het ZoomControl-scherm te wijzigen. Zie pagina 7 voor details.

myPilot gebruiken

"direct control"-modus

In de "direct control"-modus selecteert iedere toets het aangegeven programma-nummer.



Programma's	Links ◀	Midden 📄	Rechts ▶
Kort indrukken	1	A	2
2 seconden indrukken	3	4	5

De programmanamen worden 10 seconden weergegeven nadat een nieuw programma geselecteerd is.

- Druk op de pijl omhoog/omlaag (△/▽) om het volume te wijzigen.
- Druk gelijktijdig 2 seconden op de linker- en rechterknop (◀+▶) om de direct control-modus over te slaan

👤 De beschikbare luisterprogramma's worden door uw audicien ingesteld.

👤 In de direct control-modus zijn de schermen voor volumeregeling, submenu's en ZoomControl niet beschikbaar. Snelkeuze is echter wel beschikbaar.

www.phonak.com



Het volume veranderen

Ga in de "Klassiek"-modus naar het Volumescherm door op \triangle of ∇ te drukken. In het Volumescherm kunt u het volume van de beide hoortoestellen gelijktijdig veranderen door te drukken op \triangle om het volume te verhogen of ∇ om het volume te verlagen.










Op vergelijkbare manier kunt u de volume-instelling van uw linker (of rechter) hoortoestel afzonderlijk wijzigen. Druk op \triangleleft om de linkerzijde te kiezen (of \triangleright om de rechterzijde te kiezen) nadat u zoals hierboven beschreven naar het Volumescherm bent gegaan. Druk daarna op \triangle om het volume te verhogen en ∇ voor verlagen.

myPilot gebruiken

ZoomControl (optioneel)

Dankzij deze speciale functie kunt u uw hoorstelsel naar voren, achteren, links of rechts richten.



- Druk in de "Klassiek"-modus of het startscherm 2 seconden op de middelste knop  om naar het ZoomControl-scherm te gaan.
- Druk kort op de knop links, omhoog, rechts of omlaag (///) om de luisterrichting naar links, voor, rechts of achter te selecteren.
- Druk kort op de middelste knop  voor toegang tot de submenu's.
- Druk nogmaals 2 seconden op de middelste knop  om terug te keren naar het scherm voor programmaselectie en om het laatst gebruikte programma te activeren.
- Druk 2 seconden op de toets omhoog of omlaag om naar het volumeregelaarscherm te gaan.

Let op: Vraag uw audicien of ZoomControl beschikbaar is op uw hoortoestellen.

Speciale functies

In het menu *Instellingen* → *Snelkeuze* → *Aan-/uitknop* kunt u een speciale functie selecteren die geactiveerd wordt door kort drukken op de Aan-/uitknop.

"Home"

Druk kort op de Aan-/uitknop om de opgeslagen programma/volume-instellingen te activeren, zelfs in slaapstand.


Status uitlezen

Druk kort op de Aan-/uitknop voor het uitlezen van de status van het hoortoestel.

Visitekaart

Indien ingesteld, kunt u de contactgegevens van uw audicien in het hoofdmenu vinden onder *Contactgegevens*.

Belangrijke informatie

Voor uw veiligheid en om te profiteren van alle functies van uw myPilot, dient u de gebruiksaanwijzing van myPilot aandachtig te lezen. Besteed vooral aandacht aan het deel "Belangrijke informatie" en het volgende symbool  dat verwijst naar bijbehorende waarschuwingen.

Vraag uw audicien om meer help.