

Savia Art



АЯ 46

Фонак АГ,
Лаубисрутиштрассе 28,
CH-8712 Штефа, Швейцария

Заушные слуховые аппараты
Руководство по эксплуатации



Центр слухопротезирования:



PHONAK
hearing systems

CE
0459

Введение

В Вашем новом слуховом аппарате **Savia Art** использованы последние достижения цифровых технологий. **Savia Art** работает автоматически, обеспечивая наивысшее качество звучания и комфортность в любой обстановке. Высокие технологии превратили сложнейшие слуховые аппараты в удобные и простые в обращении устройства.

Чтобы воспользоваться всеми функциями Вашего нового слухового аппарата **Savia Art**, внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Если у Вас возникли вопросы, обратитесь к специалисту.

Savia Art – это высококачественный слуховой аппарат, созданный швейцарской компанией Phonak, мировым лидером в области технологии, инноваций и надежности слуховых аппаратов. При надлежащем уходе и соблюдении правил эксплуатации слуховой аппарат **Savia Art** надежно прослужит Вам долгие годы.

Чтобы больше узнать о слуховом аппарате **Savia Art**, посетите страничку Phonak в интернете: www.phonak.com

Phonak – ваш надежный партнер на пути к хорошему слуху!

<p>Корешок талона №2 на гарантийное обслуживание</p> <p>Слуховой аппарат Savia Art _____</p> <p>Серийный № _____</p> <p>Дата проверки _____</p> <p>Изъят _____</p> <p>Представитель ремонтной организации _____ м.п.</p>	<p>Корешок талона №1 на гарантийное обслуживание</p> <p>Слуховой аппарат Savia Art _____</p> <p>Серийный № _____</p> <p>Дата проверки _____</p> <p>Изъят _____</p> <p>Представитель ремонтной организации _____ м.п.</p>
--	--

ТАЛОН № 2 на гарантийное обслуживание

Слуховой аппарат **Savia Art** _____

Серийный № _____

Дата проверки _____ Штамп _____

Дата продажи _____

Представитель ремонтной
организации _____ м.п.

ТАЛОН № 1 на гарантийное обслуживание

Слуховой аппарат **Savia Art** _____

Серийный № _____

Дата проверки _____ Штамп _____

Дата продажи _____

Представитель ремонтной
организации _____ м.п.

Свидетельство о приемке и продаже

Слуховой аппарат **Savia Art** _____ (Phonak)

серийный № _____

FM-приемник _____ (Phonak) серийный

№ _____ признан годным для эксплуатации.

Слуховой аппарат **Savia** сертифицирован. Сертификат соответствия РОСС. СН.АЯ46. В04517 от 03.03.06.

Дата проверки _____

Штамп

Дата продажи _____

М.П.


*Адрес предприятия, осуществляющего
гарантийное обслуживание:*

Описание

Цифровой заушный слуховой аппарат **Savia Art** (далее СА) имеет ВРР – биологически близкое моделирование восприятия в 20 каналах, 6 автоматических и 5 переключаемых вручную программ, систему адаптивной цифровой направленности SurroundZoom для оптимизации звукового восприятия в шуме и интеллектуальный избирательный подавитель шума. Возможно ручное управление СА посредством переключателя TacTronic или с помощью пультов дистанционного управления (ПДУ) – в виде наручных часов или традиционного пульта.

<i>В соответствии со стандартом IEC 60118-7 и IEC 60126 (2cm³ coupler)</i>			
Параметр/модель	Savia Art 211 dSZ	Savia Art 311 dSZ	Savia Art 411 dSZ
Мах усиление, дБ	53	63	70
Мах вых. уровень звукового давления (ВУЗД ₉₀), дБ	125	130	131
Частотный диапазон, Гц	<100-6800	<100-6500	<100-6200

Описание

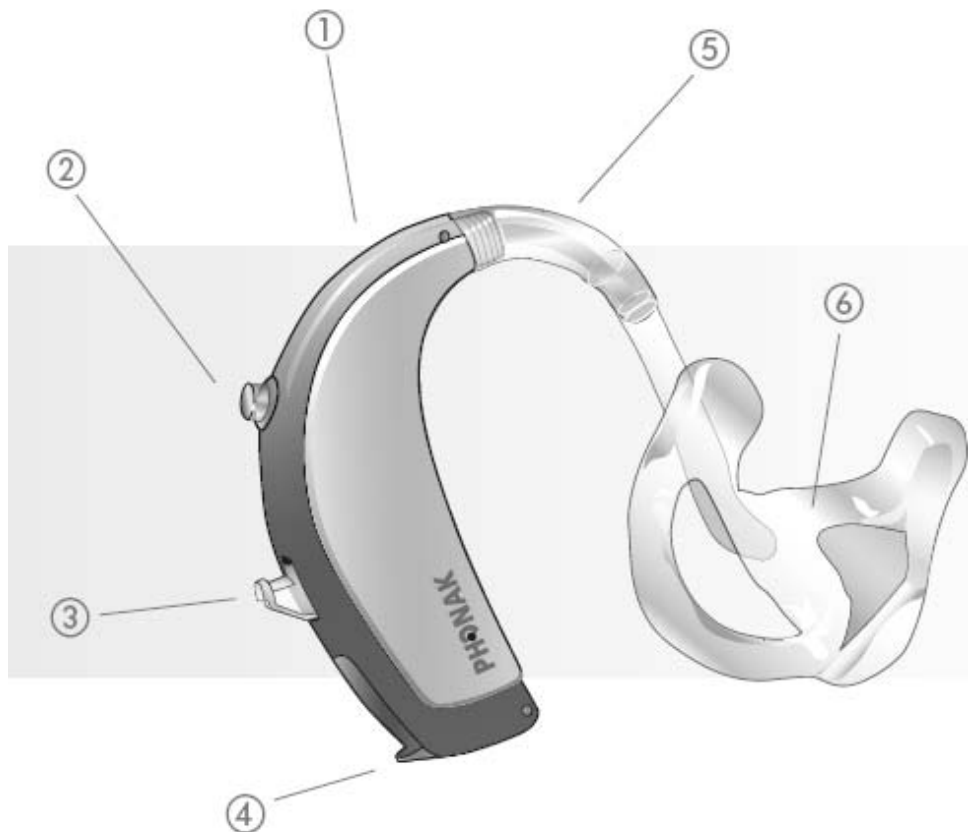

Слуховой аппарат Savia Art с индивидуальным вкладышем

- 1 – отверстия микрофонов с защитным фильтром
- 2 – переключатель программ (TacTronic)
- 3 – регулятор громкости
- 4 – батарейный отсек и выключатель
- 5 – звуковой рожок
- 6 – индивидуальный ушной вкладыш

Гарантийные обязательства

Гарантийное обслуживание слухового аппарата **Savia Art** осуществляет компания _____.

Средний срок службы слухового аппарата **Savia Art** пять лет. Бесплатное гарантийное обслуживание слухового аппарата **Savia Art** осуществляется в течение одного года со дня продажи (с отметкой о ремонте в гарантийном талоне) при:

- наличии даты продажи, печати и подписи представителя предприятия-изготовителя или торгующей организации в данном руководстве и гарантийном талоне;
- предъявлении изделия в чистом виде.

В случае отсутствия гарантийного талона или даты продажи в гарантийном талоне, гарантийные обязательства на слуховой аппарат **Savia Art** вступают в силу с даты проверки.

Гарантийные обязательства не распространяются на слуховые аппараты **Savia Art**:

- с механическими повреждениями;
- носящие следы химического воздействия
- подвергавшиеся самостоятельной разборке, а также при нарушении условий эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации.
- при обращении в неуполномоченные сервисные центры

В этих случаях ремонт производится за счет покупателя.

Информация по безопасности

⚠ Батарейки, используемые в слуховых аппаратах, токсичны, не допускайте их проглатывания! Храните их в недоступных для детей и домашних животных местах. При случайном проглатывании батарейки немедленно обратитесь к врачу!

⚠ Пользуйтесь только теми слуховыми аппаратами, которые были запрограммированы специально для Вас. В противном случае аппараты будут неэффективны или даже могут нанести вред Вашему слуху.

⚠ Рентгеновское излучение (например, компьютерная или магнитно-резонансная томография) может нарушить работу Ваших слуховых аппаратов. Мы рекомендуем снимать слуховые аппараты перед прохождением рентгенологического обследования и оставлять их вне помещения, в котором проводится обследование.

⚠ В режиме направленного микрофона слуховые аппараты подавляют окружающий шум. При этом предупреждающие сигналы или гудок приближающегося автомобиля могут быть частично или полностью подавлены, если их источник находится позади Вас.

Слуховой аппарат Savia Art с тонким звуководом Fit'nGo

1-4 – см. предыдущую страницу

5 – тонкий звуковод

6 – стандартный вкладыш

7 – фиксатор



Слуховой аппарат Savia Art с тонким звуководом Fit'nGo

1-5 – см. предыдущую страницу

6 – стандартный звуковод Fit'nGo

7 – фильтр серы Fit'nGo


8 – фиксатор



Краткое руководство по эксплуатации


Замена батарейки

Подробное описание см. ниже

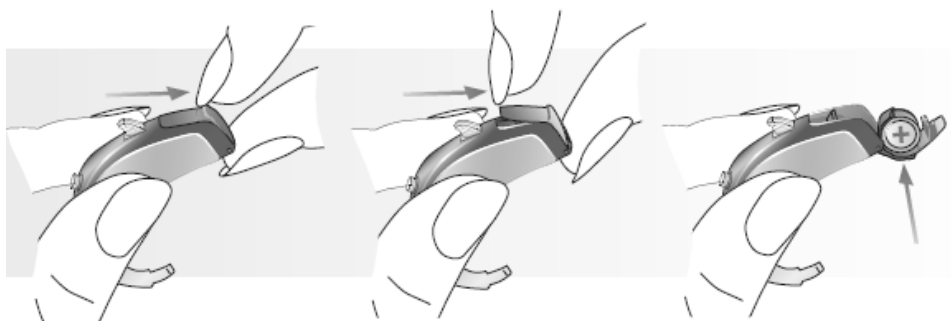

Включение и выключение

Подробное описание см. ниже

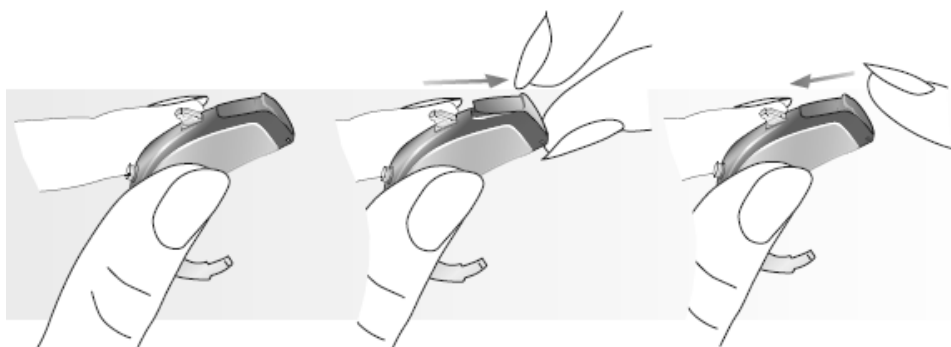

ВКЛ.

ВЫКЛ.

ВКЛ.

6. Лак для волос, крем и косметика могут повредить слуховые аппараты. Снимайте СА перед тем, как накладывать косметику.
7. Обратитесь к врачу при появлении признаков раздражения кожи или воспаления в области уха.
8. Если Ваш СА не работает при правильно вставленном элементе питания, обратитесь к специалисту. Если Вы пользуетесь пультом дистанционного управления, не забудьте представить его для проверки вместе со слуховым аппаратом.

Техническое обслуживание.

Условия эксплуатации

1. При замене батареек пользуйтесь только новыми элементами питания.
2. Если Вы не пользуетесь СА, оставляйте батарейный отсек открытым для испарения влаги.
3. Если Вы не пользуетесь СА длительное время, храните его в оригинальной упаковке. Выньте батарейку и оставьте батарейный отсек открытым. Прежде, чем закрыть упаковку, убедитесь, что слуховой аппарат абсолютно сухой.
4. Берегите СА от излишней влаги и тепла. Не забывайте снимать СА перед купанием и плаванием! Летом не оставляйте его на подоконнике или в закрытом салоне автомобиля. Избегайте ударов и вибрации.
5. Осуществляйте ежедневную чистку и просушивание СА, используя специальные средства по уходу. Никогда не используйте моющие средства (порошки, мыло и т.д.) для очистки аппарата.

Регулировка громкости

Подробное описание см. ниже

Увеличение громкости

Уменьшение громкости



Выбор программы прослушивания

Подробное описание см. ниже




Подготовка


Замена батарейки

Все заушные слуховые аппараты Savia Art работают на батарейке типоразмера 13.


Полностью откройте батарейный отсек кончиком пальца и выньте старую батарейку.

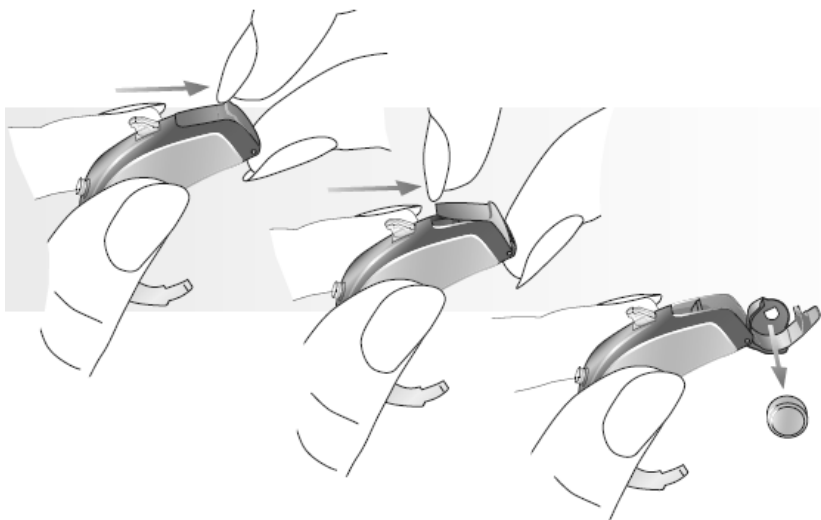

Удалите защитную пленку с новой батарейки.

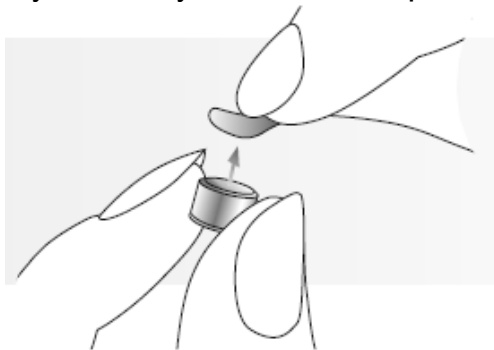


Тонкий звуковод и стандартный вкладыш необходимо заменять не реже одного раза в три месяца, а также при признаках затвердения или ломкости трубочки. Стандартный вкладыш должен заменяться только специалистом. В противном случае он может отсоединиться от звуковода и повредить ухо при надевании аппарата.

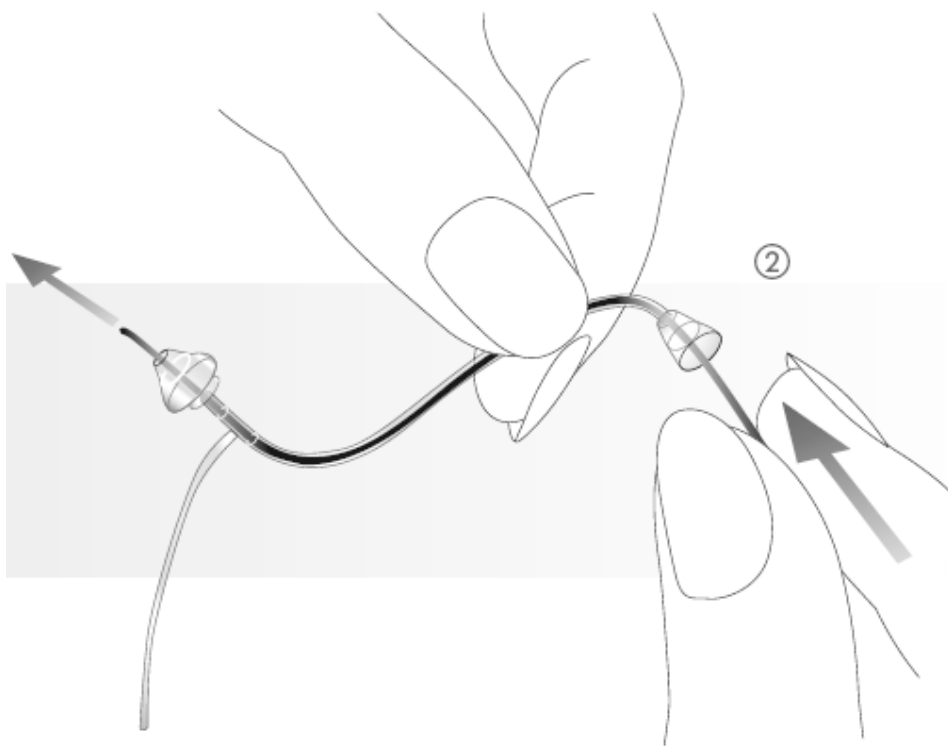

Вставьте чистящую леску в тот конец звуковода, которым он прикрепляется к слуховому аппарату и протолкните ее по всей длине звуковода, включая вкладыш (2). После этого не забудьте извлечь чистящую леску. Не рекомендуется промывать звуковод и вкладыш водой, т.к. капли воды могут остаться в просвете звуковода. Это, в свою очередь, может привести к нарушению проведения звука по звуководу, а также к повреждению электроники слухового аппарата.

Установите новую батарейку так, чтобы знак «+» (плоская сторона батарейки) был направлен в ту же сторону, что и знак «+» на крышке батарейного отсека.

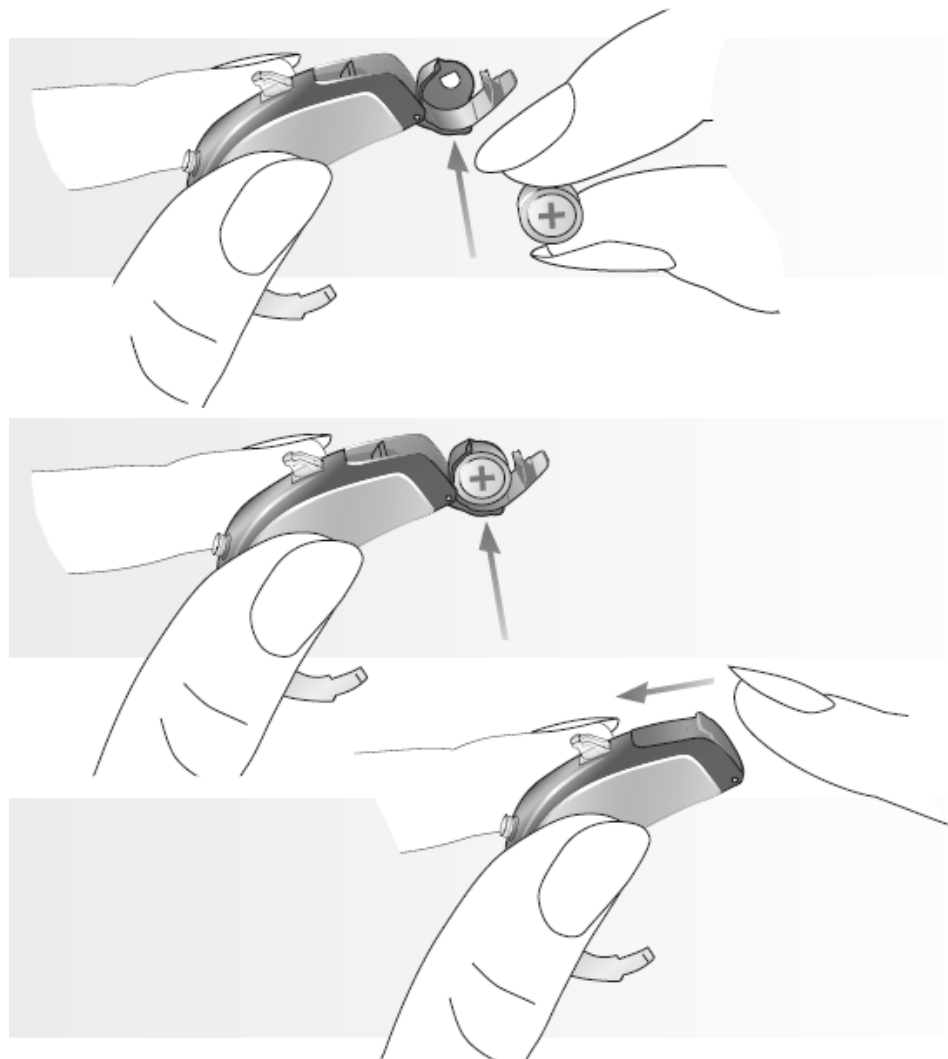


Замена батарейки

- ⚠️ Обращайтесь с крышкой батарейного отсека аккуратно, без чрезмерных усилий.
- ⚠️ Если закрывая крышку Вы испытываете сопротивление, убедитесь, что батарейка вставлена правильно. В противном случае крышка не закроется, и слуховой аппарат не будет работать.
- ⚠️ Если Вы не пользуетесь слуховым аппаратом, оставляйте крышку батарейного отсека открытой для испарения влаги.
- ⚠️ Пользуйтесь батарейками, рекомендованными специалистом, у которого Вы приобрели слуховой аппарат.

Предупреждение о разряде батарейки:

О разряде батарейки Вас заранее предупредит звуковой сигнал. Обычно он подается за 30 минут до полного разряда батарейки. У батареек очень высокого качества этот промежуток времени существенно длиннее, поэтому Вы будете слышать предупредительный сигнал через каждые 30 минут.

Перед чисткой отвинтите тонкий звуковод от слухового аппарата (1). С помощью влажной ткани протрите тонкий звуковод и стандартный вкладыш снаружи, а для удаления загрязнения из просвета звуковода воспользуйтесь специальной чистящей леской.

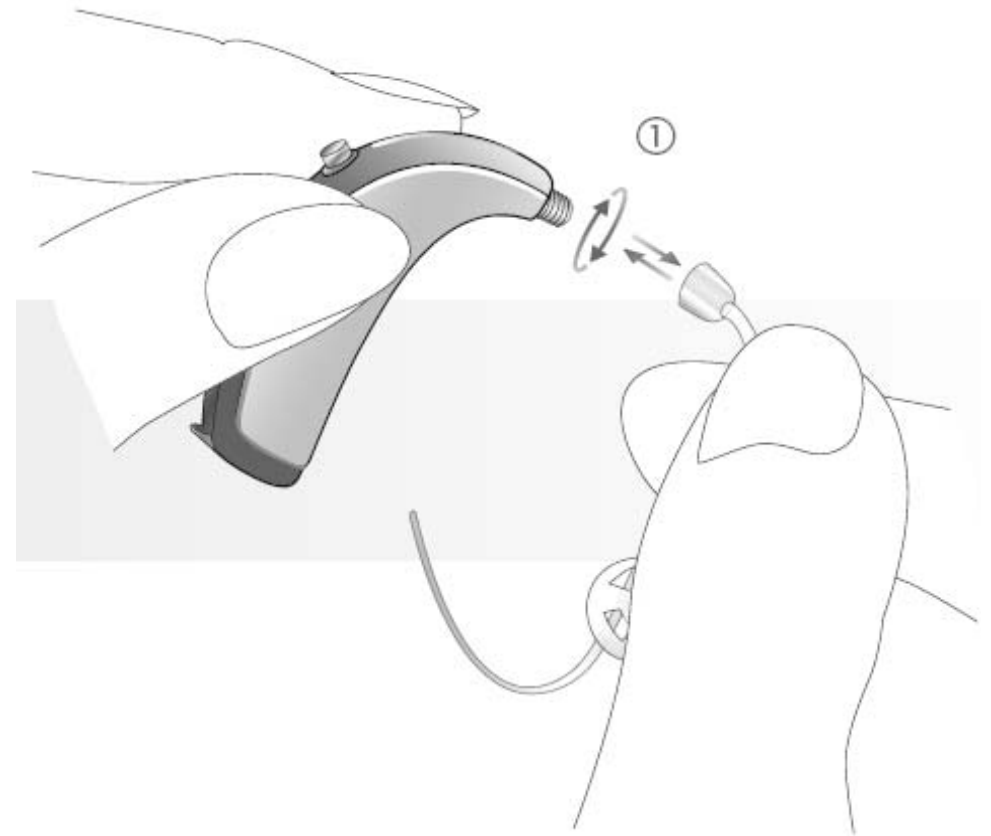

Открытое слухопротезирование: Тонкий звуковод Fit'nGo


Приводимые ниже инструкции помогут Вам продлить срок службы слухового аппарата, снабженного тонким звуководом, и обеспечить качество и комфортность звучания.

Тонкий звуковод передает звук от слухового аппарата в ухо. Важно, чтобы тонкий звуковод и стандартный вкладыш были правильно подобраны. Если тонкий звуковод или стандартный вкладыш раздражают ухо и вынуждают Вас отказываться от использования слухового аппарата, обратитесь к специалисту. Не пытайтесь самостоятельно изменить форму тонкого звуковода. Тонкий звуковод и стандартный вкладыш необходимо регулярно чистить.

Блокировка батарейного отсека

Чтобы защитить детей от опасной игры с батарейками, слуховой аппарат можно снабдить специальным блокиратором. Блокиратор можно также использовать для маркировки левого и правого слухового аппарата.

Чтобы заблокировать закрытый батарейный отсек: С помощью отвертки поверните винт в среднее положение (шлиц расположен вертикально).

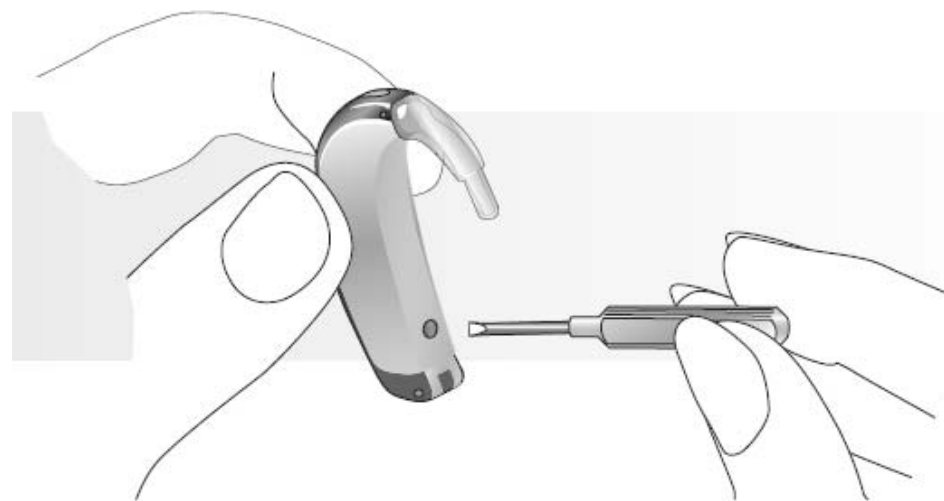

Чтобы разблокировать крышку батарейного отсека, поверните винт до упора.

Закрывая крышку батарейного отсека, убедитесь, что винт не находится в положении блокирования.

Заблокировано

Разблокировано



⚠ Если батарейный отсек заблокирован, выключить слуховой аппарат невозможно. Для выключения аппарата необходимо предварительно разблокировать крышку батарейного отсека.

Внимание: Проконсультируйтесь со специалистом относительно замены защитных фильтров, если Вы заметили, что:

- Слуховой аппарат звучит тише, чем обычно
- Ухудшилось качество звука
- Появились затруднения при общении в шумной обстановке
- Стало труднее определять положение источника звука

Вскоре Вы сможете самостоятельно определять необходимость замены защитного фильтра.

Рекомендуется заменять фильтр, не дожидаясь ухудшения работы слухового аппарата.

Приведенные ниже рекомендации помогут Вам продлить срок службы и повысить эффективность защитных фильтров:


- ⚠️ Никогда не протирайте и не очищайте защитный фильтр – он может потерять свои акустические и защитные свойства.
- ⚠️ Защитный фильтр состоит из двух одинаковых частей. Всегда заменяйте оба защитных фильтра одновременно.
- ⚠️ Лак для волос и косметика могут повредить защитный фильтр. Перед применением косметических средств снимайте свои слуховые аппараты.
- ⚠️ Надевая слуховой аппарат и нажимая на переключатель программ, старайтесь не прикасаться к защитному фильтру.

Маркировка левого и правого слухового аппарата


Важно не перепутать правый и левый слуховые аппараты (если Вы носите два аппарата).

Специалист может маркировать Ваши слуховые аппараты. Левый и правый аппараты будут отличаться цветом маркировки.

Применяется следующая цветовая маркировка:

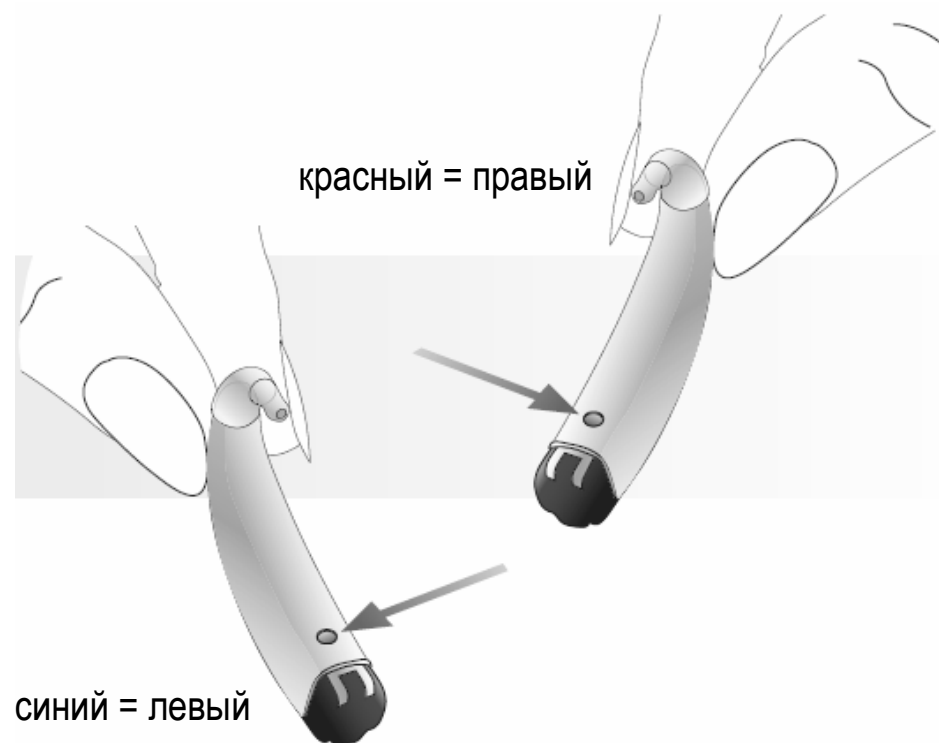

Надевание слухового аппарата Savia Art с стандартным вкладышем

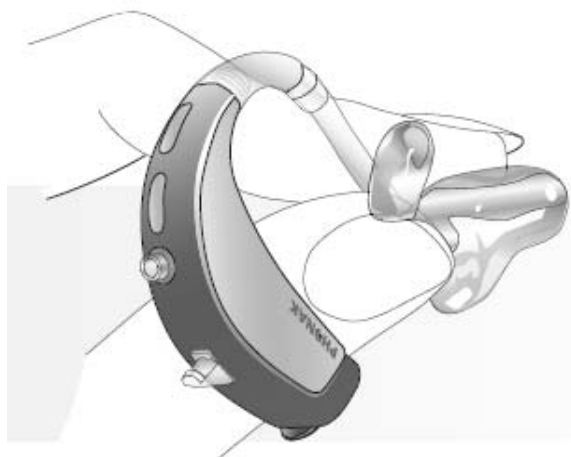

Держите ушной вкладыш большим и указательным пальцами (соответственно стороне того уха, на которое Вы собираетесь надеть слуховой аппарат).



Поднимите руку на уровень уха, так чтобы конец вкладыша был направлен в сторону слухового прохода.

Уход за аппаратом

Защитный фильтр


Примечание: Защитный фильтр – эксклюзивная система, разработанная компанией Phonak для защиты высококачественных микрофонов Savia Art от пыли и влаги. В результате микрофоны служат гораздо дольше, уменьшая расходы на обслуживание Ваших слуховых аппаратов. Срок службы защитного фильтра достигает нескольких месяцев и зависит от условий эксплуатации (влажность, запыленность, потоотделение и т.п.). Защитный фильтр нельзя чистить – его нужно регулярно заменять. Ни в коем случае не пользуйтесь слуховыми аппаратами без защитного фильтра.



FM-передатчики:

SmartLink SX: Полная коммуникационная система, объединяющая:


- дистанционное управление слуховым аппаратом
- современные функции FM
- связь с мобильным телефоном по каналу Bluetooth

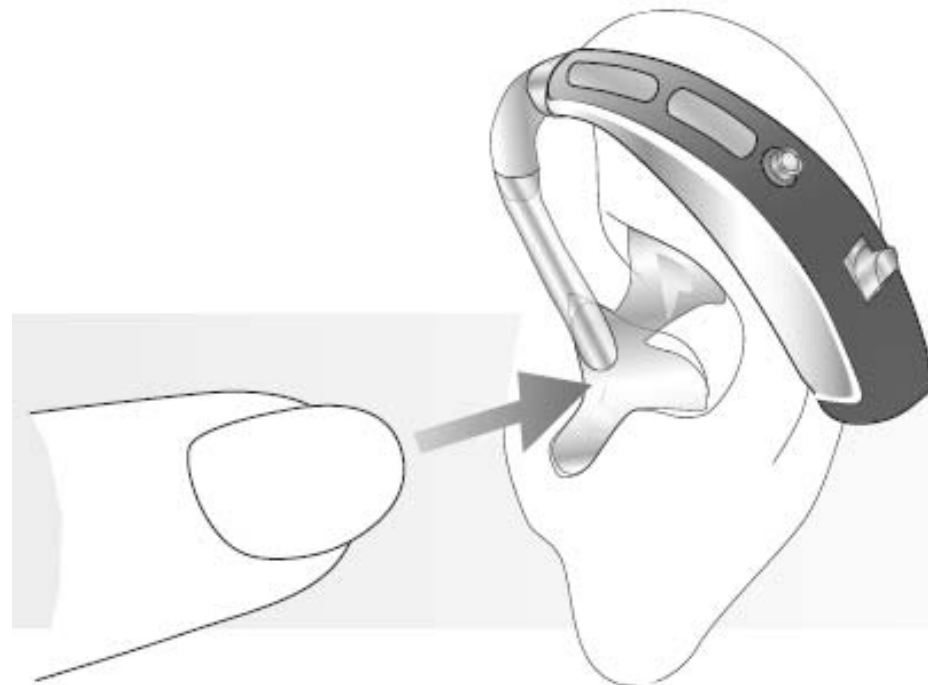

Введите канальную часть ушного вкладыша в слуховой проход. При затруднении можно другой рукой слегка оттянуть ушную раковину назад и вверх. После этого легким вращательным движением завершите введение ушного вкладыша. При этом его завитковая часть должна оказаться под кожной складкой.

Campus SX: Специально разработан для учебных заведений.



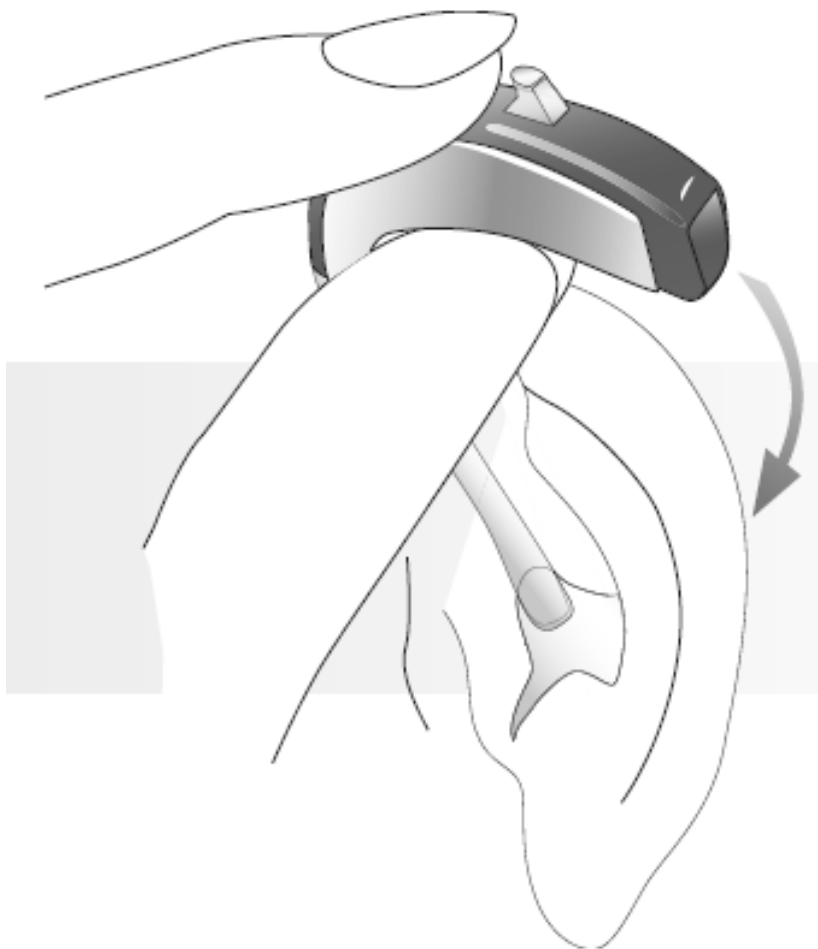

Заведите слуховой аппарат за ухо.
Избегайте перекручивания гибкого звуковода.

Многочастотные FM-устройства

Phonak рекомендует использовать Ваш слуховой аппарат Savia Art со следующими FM-системами.


FM-приемники:

MicroLink ML9S:

Великолепно интегрирован в дизайн Savia Art.



Универсальный приемник MicroMLxS совместно с аудиоадаптером AS9-MLxS.

 Если Вы пользуетесь FM-приемником MicroMLxS или MLx, установите его переключатель в положение «●».



EasyFM

Функция EasyFM автоматически включает FM-программу при обнаружении FM-сигнала, если Ваш слуховой аппарат с подключенным FM-приемником находится в режиме "А" (автоматический). Включение подтверждается звуковым сигналом. При отключении FM-сигнала слуховой аппарат возвращается в режим "А".

Вы можете вручную выйти из режима EasyFM с помощью переключателя программ или ПДУ.

Выбор FM-программы вручную

- ПДУ (SmartLink SX, WatchPilot2 или SoundPilot2): воспользуйтесь клавишами FM Вашего ПДУ для выбора "FM+M" (включены FM и микрофон слухового аппарата) или "FM" (только FM-сигнал). Включение подтверждается звуковым сигналом.
- Переключатель программ (если он активирован специалистом): нажимайте на него до тех пор, пока не включится нужная FM-программа. Включение подтверждается звуковым сигналом.




Проверьте, правильно ли установлен вкладыш. Для этого проведите пальцем вдоль его контура.

Чтобы снять слуховой аппарат, захватите вкладыш (не звуковод) пальцами и аккуратно извлеките его из уха.


Надевание слухового аппарата Savia Art с тонким и стандартным звуководом Fit'nGo

Открытый вкладыш:

Расположите слуховой аппарат за ухом (1).

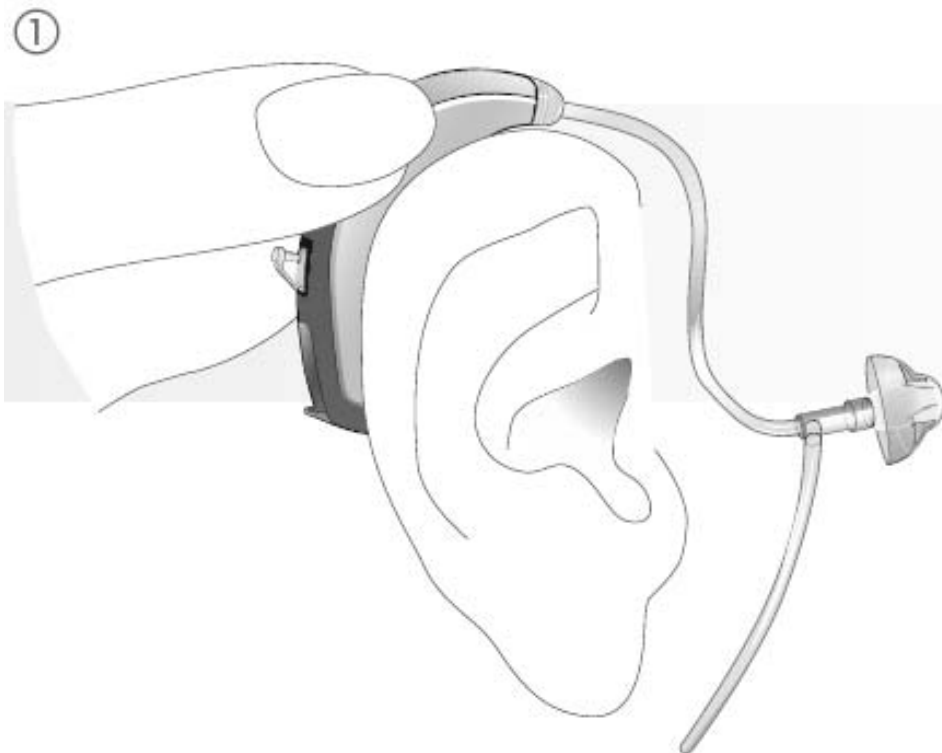

Возьмите гибкий звуковод в месте его прикрепления к вкладышу/фильтру серы (2) и аккуратно введите в слуховой проход.

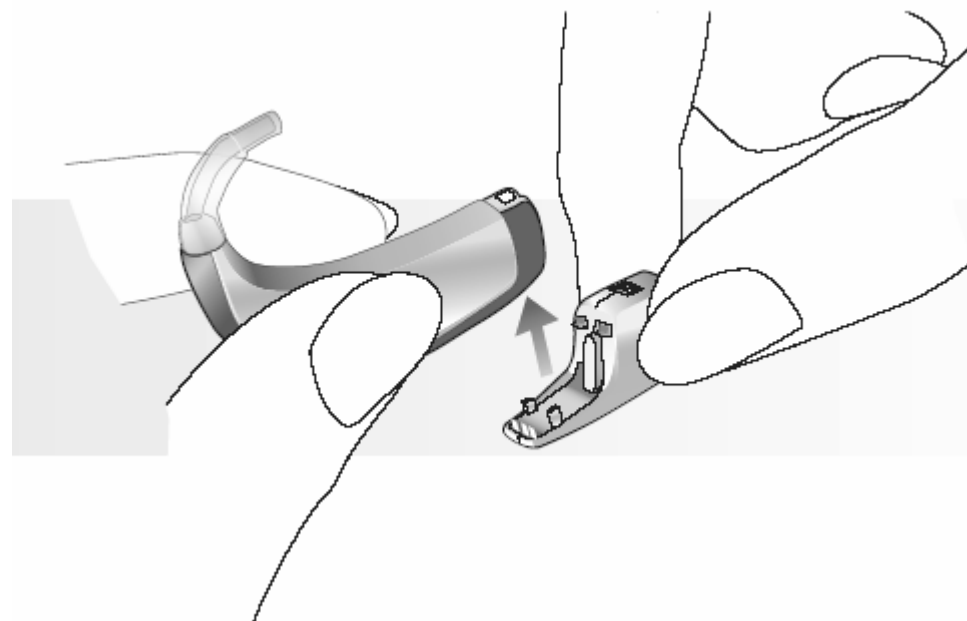


Если приемники MicroLink не используются, они автоматически переходят в состояние ожидания с низким потреблением энергии.


Примечание:

С помощью аудиоадаптера к Вашему слуховому аппарату Savia Art можно подключить универсальный применик MicroMLxS или другой источник аудиосигнала.


Щелчок свидетельствует о том, что приемник (аудиоадаптер) надежно присоединен к слуховому аппарату.

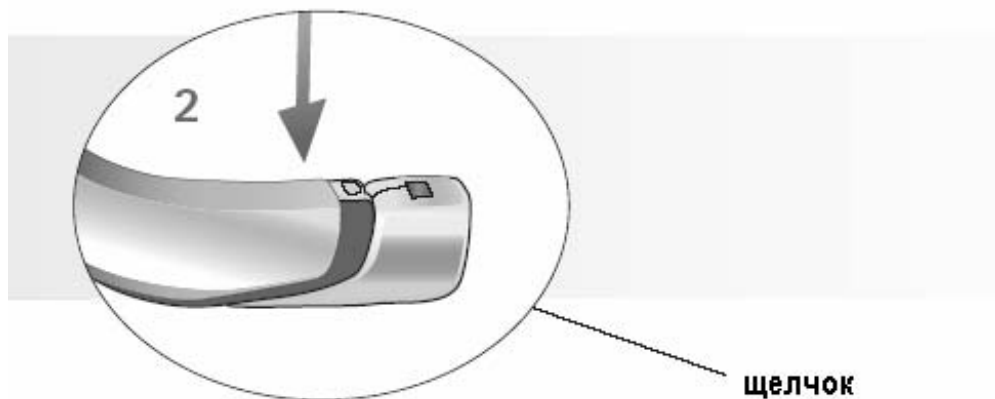

Чтобы отключить MicroLink ML9S или аудиоадаптер, поместите слуховой аппарат на твердую поверхность, плотно захватите MicroLink (аудиоадаптер) и сдвиньте замок фиксатора. Другой рукой потяните слуховой аппарат вверх.

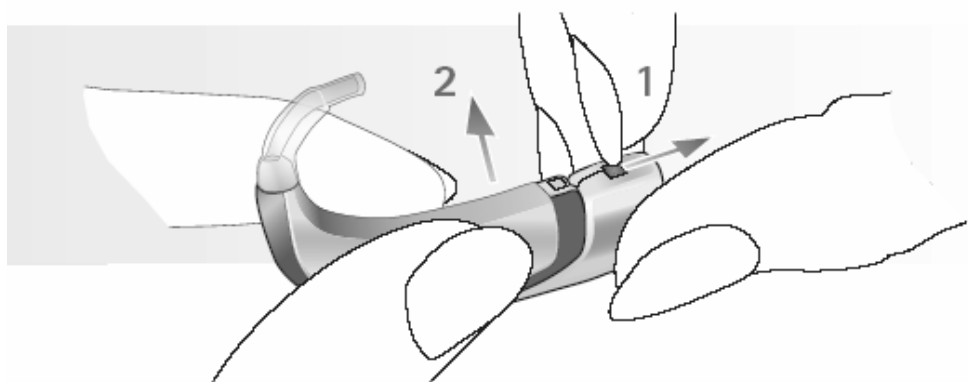

Вкладыш/фильтр серы должен быть введен в слуховой проход достаточно глубоко, так чтобы гибкий звуковод прилегал к коже (2).

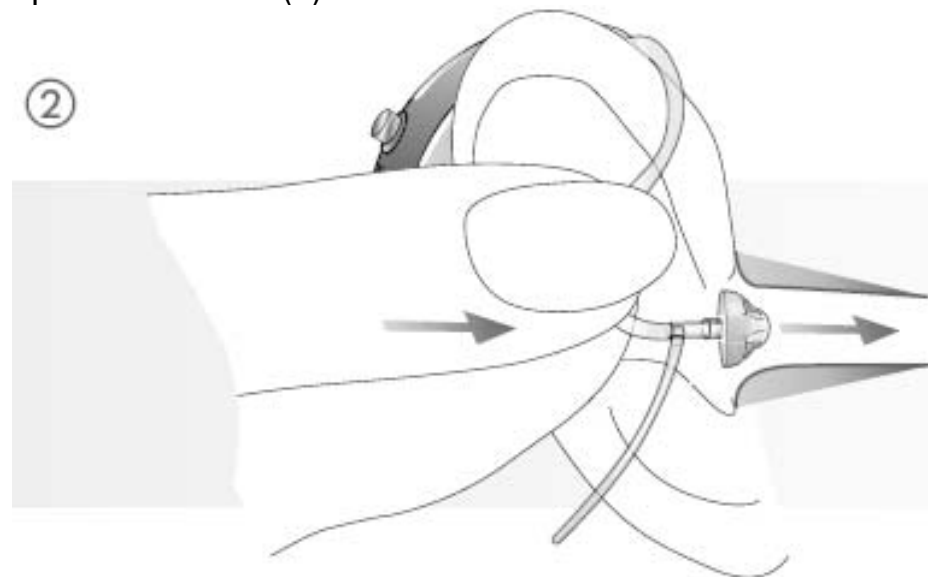

После этого расположите фиксатор в углублении ушной раковины (3).




Закрытые вкладыши:

Конструкция закрытого вкладыша отличается от конструкции открытого вкладыша (см. рис. на следующей странице). Закрытый вкладыш состоит из двух перекрывающихся лепестков. Перед тем, как ввести закрытый вкладыш в слуховой проход, необходимо проверить, правильно ли расположены лепестки. Большой лепесток должен располагаться поверх меньшего (см. рис. 4). Неправильное положение лепестков легко исправить (рис. 5), отогнув, а затем отпустив большой лепесток так, чтобы он расположился поверх меньшего (см. рис. 6). Убедитесь, что линия разреза вкладыша находится в горизонтальной плоскости относительно трубочки, как показано на рис. 4. Теперь вкладыш можно ввести в слуховой проход.

Подключение/отключение FM-приемника MicroLink ML9S / аудиоадаптера AS9

Специалист уже подготовил Ваш слуховой аппарат Savia Art к работе с FM-приемником.

Чтобы подключить приемник MicroLink ML9S или аудиоадаптер AS9, совместите нижнюю часть слухового аппарата с приемником (адаптером) так, чтобы его направляющая вошла в паз крышки батарейного отсека (1). При этом фиксаторы приемника утапливаются.

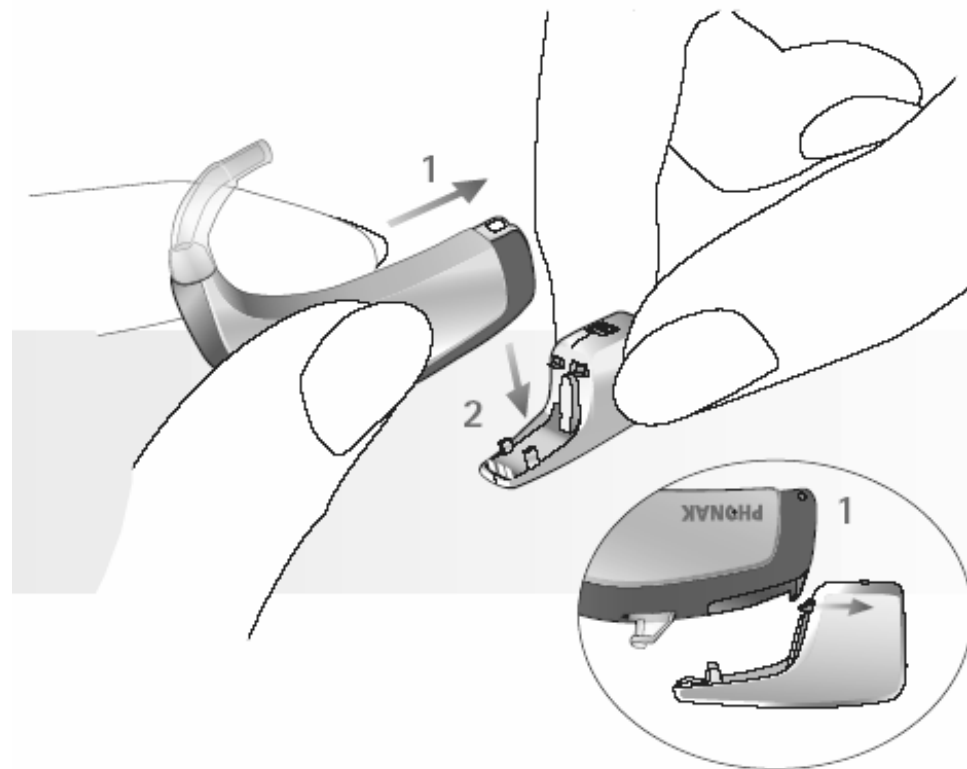

Savia Art и FM-системы (опция)

Ваш слуховой аппарат Savia Art снабжен прямым аудиовходом (DAI). Это позволяет Вам полностью воспользоваться преимуществами, предоставляемыми современными системами беспроводной связи Phonak.

FM-системы существенно облегчают общение в условиях шума, реверберации или большого расстояния до источника звука. Система беспроводной FM-связи состоит из передатчика (напр. SmartLink) и приемника. Передатчик располагается вблизи источника звука или непосредственно подключается к телевизору, радиоприемнику или телефону. Его также можно подключить к мобильному телефону по каналу Bluetooth. При этом аудиосигнал передается на приемники MicroLink, подключенные к Вашим слуховым аппаратам.


Многочастотные приемники MicroLink ML9S или MicroMLxS – это самые миниатюрные в мире современные FM-приемники. Они включаются автоматически за счет функции EasyFM или вручную – с помощью переключателя TacTronic или ПДУ.

Более подробную информацию об использовании FM-систем можно найти в инструкциях к соответствующим FM-передатчикам.


(4) Правильное положение



(5) Неправильное положение

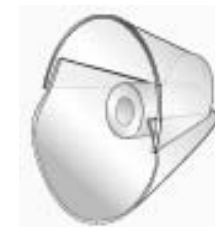

(6) Перемещение лепестков

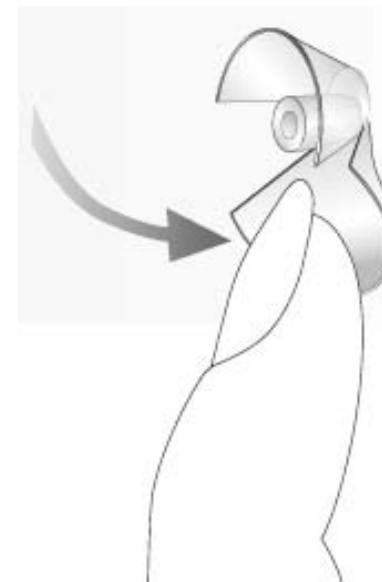


Настройка, основанная на Ваших личных предпочтениях

В процессе настройки невозможно воспроизвести все особенности Вашего звукового окружения. Решение этой проблемы – способность слухового аппарата Savia Art запоминать производимую Вами регулировку громкости. Savia Art обладает уникальной функцией, называемой “Self Learning” (самообучение). В памяти слухового аппарата сохраняются все изменения громкости, выполненные Вами вручную. Это означает, что всякий раз, когда Вы меняете громкость слухового аппарата Savia Art, это действие учитывается для последующего автоматического изменения громкости в аналогичной звуковой ситуации.

Self learning обеспечивает полностью персонализированную настройку громкости в любой обстановке.

SmartLink SX – это полная коммуникационная система, объединяющая пульт дистанционного управления слуховыми аппаратами, связь FM и связь Bluetooth.

Подробная информация об использовании пультов дистанционного управления приводится в соответствующих руководствах по эксплуатации.

 Не пользуйтесь пультами дистанционного управления там, где запрещено пользоваться электронными устройствами, например в самолетах.

KeyPilot2: миниатюрный, простой, удобный (без доступа к программам FM).




Оптимальное положение ПДУ во время работы показано на приведенном ниже рисунке.



Работа с аппаратом


Включение и выключение

Выключение:

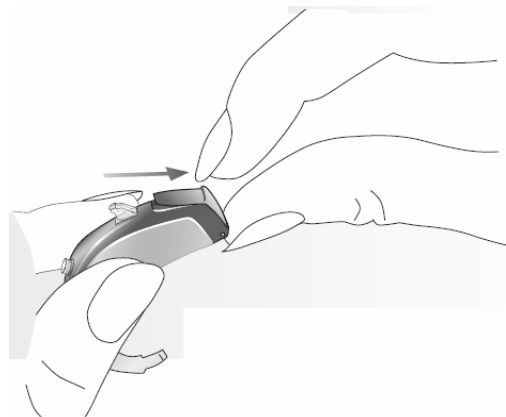

Ногтем приоткройте крышку батарейного отсека, так чтобы она зафиксировалась в положении ВЫКЛ.

Включение:

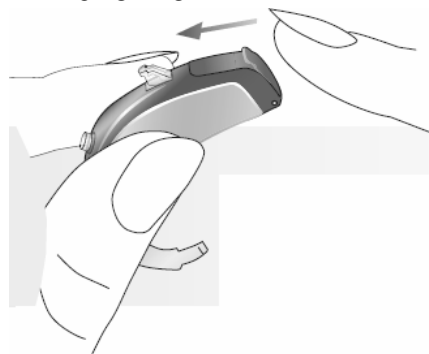

Закройте батарейный отсек. При включении слуховые аппараты Savia Art всегда начинают работать в исходной программе на запрограммированном уровне громкости.

Для предотвращения неприятных звуков в момент надевания слухового аппарата, специалист может настроить задержку включения питания Savia Art на 9 или 15 секунд. Включение подтверждается звуковым сигналом.

WatchPilot2: эксклюзивный и современный, производится в мужском и женском вариантах, со спортивным резиновым ремешком или элегантным металлическим браслетом.



SoundPilot2: непосредственный доступ ко всем функциям слуховых аппаратов Savia Art.



Дистанционное управление (опция)

Пульты дистанционного управления (ПДУ) Phonak позволяют легко и удобно управлять всеми функциями Вашего слухового аппарата Savia Art:

- Прибавлять и убавлять громкость
- Переключать программы
- Выбирать режим FM

Если Вы пользуетесь двумя слуховыми аппаратами, ПДУ будет одновременно управлять обоими. Это обеспечивает бинауральный баланс громкости.

Phonak предлагает большой выбор ПДУ. Попросите специалиста продемонстрировать все пульты, чтобы Вы смогли выбрать наиболее понравившийся и удобный в использовании.


Регулировка громкости

Вы можете увеличивать или уменьшать громкость звучания слухового аппарата Savia Art относительно запрограммированного уровня.

Увеличение громкости



Уменьшение громкости

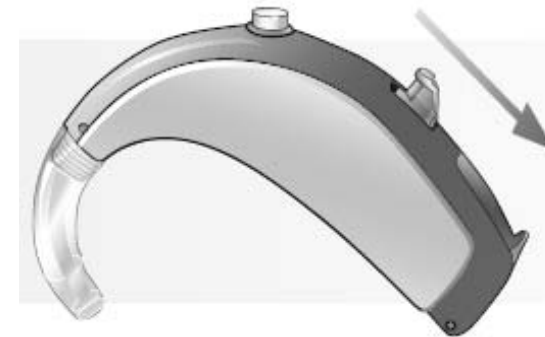

Примечание:

- Каждое нажатие на регулятор громкости подтверждается звуковым сигналом. Двойной сигнал означает, что Вы достигли максимального или минимального предела регулировки громкости.
- При необходимости специалист может удалить (извлечь) регулятор громкости.
- Громкость слуховых аппаратов Savia Art можно также регулировать с помощью пультов дистанционного управления Phonak.



Использование EasyPhone^{plus}

Пользуйтесь телефоном, как обычно. Включение функции EasyPhone^{plus} подтверждается звуковым сигналом. Вам может потребоваться некоторое время для выбора положения телефонной трубки, обеспечивающего надежное включение функции EasyPhone^{plus} и комфортное звуковосприятие.

При необходимости Вы можете переклеить магнит в положение, соответствующее максимальному удобству использования телефона.

⚠ Храните магниты в недоступном для детей и домашних животных месте. При случайном проглатывании магнита обратитесь за помощью к врачу.


⚠ Магнит, используемый для усиления магнитного поля Вашего телефона, может повлиять на работу некоторых медицинских устройств или электронных систем. *Всегда держите магнит (или телефон, снабженный магнитом) на расстоянии не менее 30 см от кардиостимуляторов, кредитных карт, дискет и других чувствительных к магнитному полю устройств.*

⚠ Значительные искажения при наборе номера и разговоре по телефону могут означать, что магнит непосредственно влияет на динамик телефона. Во избежание повреждения телефона переместите магнит в другое положение.



Если при разговоре по телефону Вы держите его в правой руке, прикрепите магнит к верхней правой части телефонной трубки.

Если Вы привыкли держать телефон в левой руке, прикрепите магнит к верхней левой части телефонной трубки.

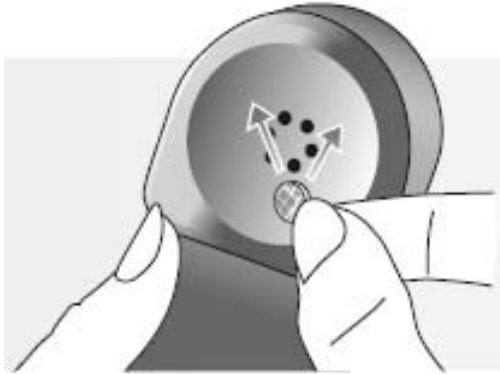

Для приклеивания магнита к выбранному участку телефонной трубки воспользуйтесь двусторонней клеящей пленкой. Не заклеивайте отверстия динамика телефонной трубки. Убедитесь, что магнит надежно приклеился к телефону.

Выбор программы прослушивания

Автоматическое переключение программ

Переключение программ в аппаратах Savia Art происходит полностью автоматически. Savia Art распознает различные варианты акустической обстановки и автоматически выбирает наиболее подходящую программу прослушивания.

Дополнительные программы

При необходимости специалист может настроить для Вас дополнительные индивидуальные программы, предназначенные для конкретной звуковой обстановки или для использования FM (беспроводной связи). Дополнительные программы могут быть выбраны с помощью пульта дистанционного управления и/или переключателя программ.



Переключатель программ (TacTronic):

Переключатель программ позволяет переключаться из автоматического режима в режим заглушения. Выбор автоматического режима подтверждается коротким мелодичным сигналом.

Индукционная (телефонная) катушка (опция)

Специалист может активировать в Вашем слуховом аппарате Savia Art телефонную катушку. Она может использоваться при разговоре по совместимому с ней телефону или при нахождении в помещении, оборудованном индукционной петлей (в некоторых школах, театрах, храмах и т.п.), а также в комплекте с беспроводной FM-системой Phonak MyLink.

EasyPhone^{plus} (опция)

Функция EasyPhone^{plus} позволяет Вашему слуховому аппарату Savia Art автоматически включать программу разговора по телефону при поднесении телефонной трубки к уху. Переключение программы подтверждается звуковым сигналом. Слуховой аппарат автоматически возвращается в предыдущую программу прослушивания при отдалении телефонной трубки от уха.

Некоторые телефоны обладают магнитным полем, достаточным для активации функции EasyPhone^{plus}. Однако у большинства телефонов для этого необходимо прикрепить к трубке дополнительный магнит.

Прикрепление магнита EasyPhone^{plus}



Тщательно протрите телефонную трубку. Держите трубку вертикально, как при обычном телефонном разговоре. Поднесите магнит к динамику трубки и отпустите его. Магнит автоматически прикрепится к трубке нужной стороной.